




Posizionamento CIED

ISTRUZIONI
STEP BY STEP

PREPARAZIONE:

1

La preparazione chirurgica della cute deve essere eseguita immediatamente prima dell'inizio della procedura con una soluzione antisettica raccomandata (considerare il blocco del piano fasciale per l'anestesia locale).

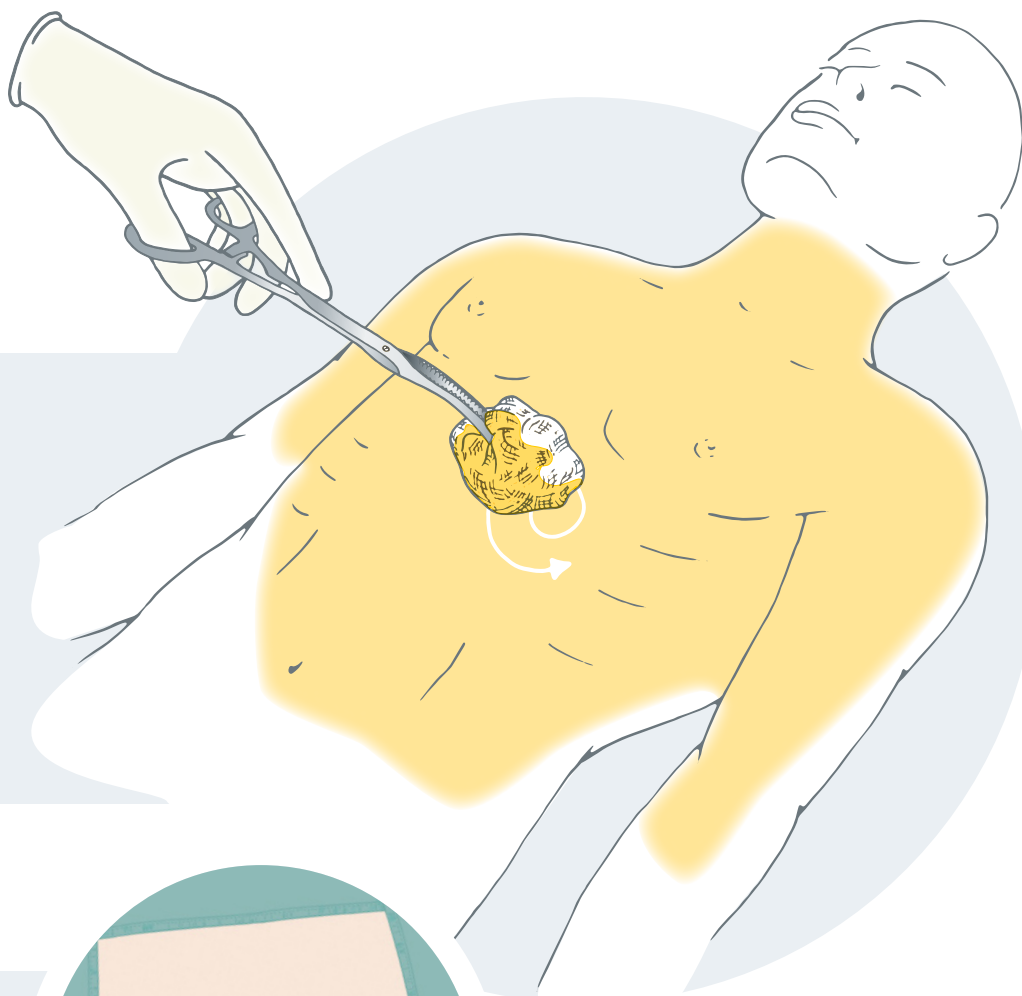


2

Predisporre telo chirurgico sul paziente.



3

Trasferire **TauroPaceTM** in contenitore sterile contenente tamponi chirurgici.

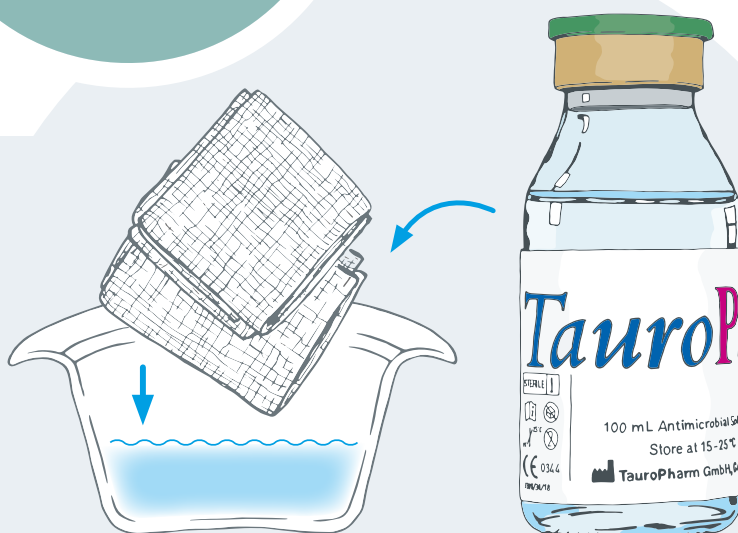

 **TauroPaceTM**


 soluzione antisettica



1


Dopo l'incisione della cute e la preparazione dell'accesso alla vena, pulire la guaina/dilatatore con **TauroPace™** prima del posizionamento.

5 ml

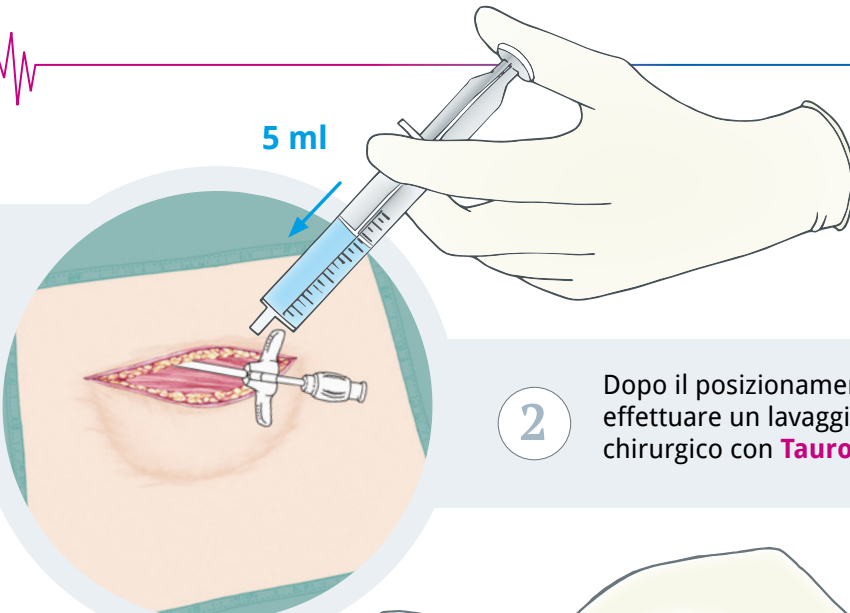

2

Dopo il posizionamento, effettuare un lavaggio del sito chirurgico con **TauroPace™**.

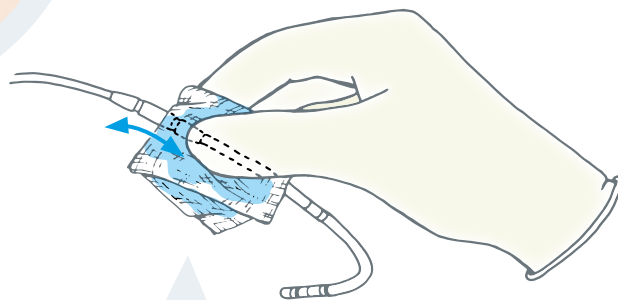


3

Pulire l'elettrocatteter(i) con un tampone imbevuto di **TauroPace™** prima del posizionamento. Assicurarsi di frizionare il manicotto di sutura con un tampone imbevuto di **TauroPace™** (importante).

4


Spostare il manicotto di sutura nella posizione finale con un tampone imbevuto di **TauroPace™**.

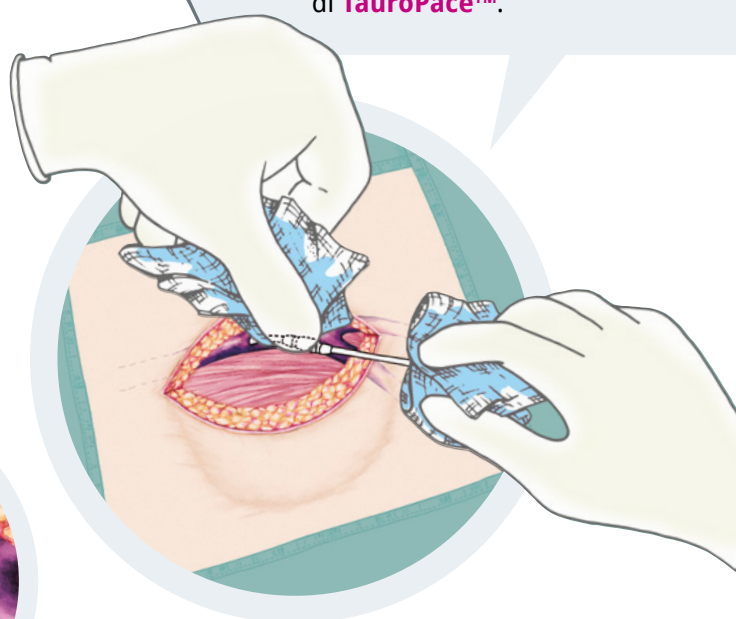


5

Dopo il posizionamento dell'elettrocatteter(i), instillare il sito chirurgico con **TauroPace™**.


5 ml

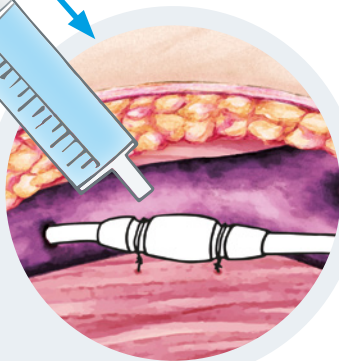

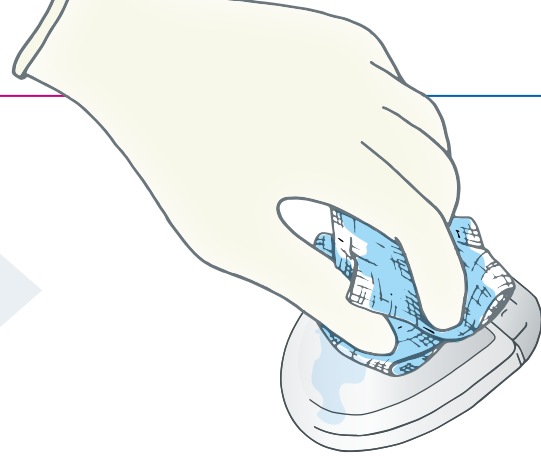

6

Frizionare la superficie del nuovo generatore con un tampone imbevuto di **TauroPace™**.

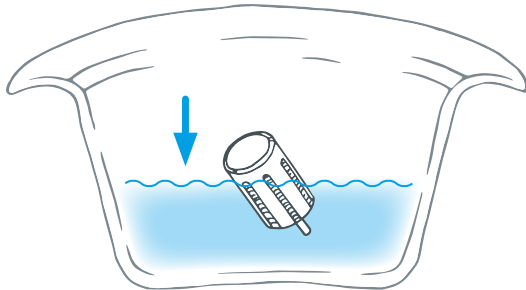


7

Immergere la chiave dinamometrica in **TauroPace™**.

8

Collegare l'elettrocattetere (i) al generatore; utilizzare i tamponi imbevuti di **TauroPace™**.

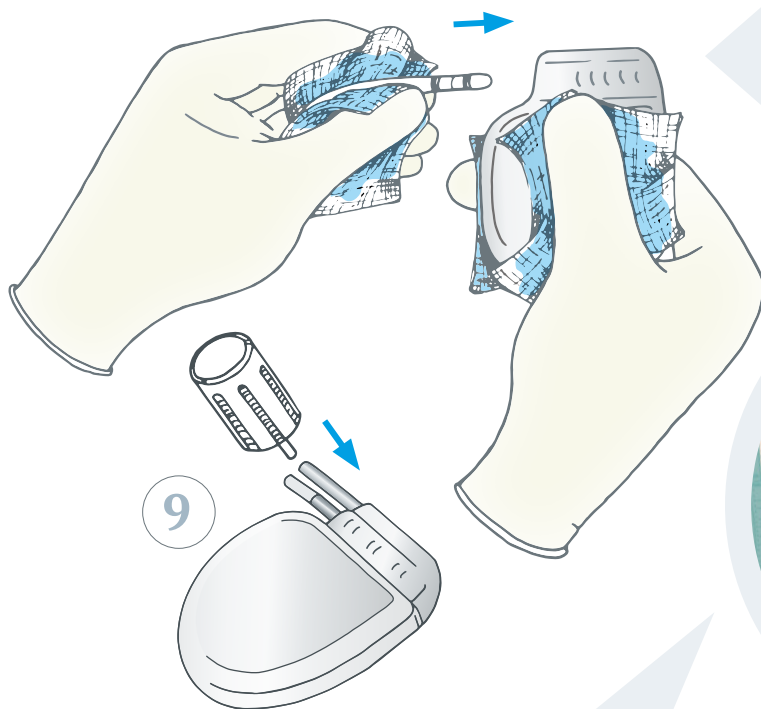

10 ml

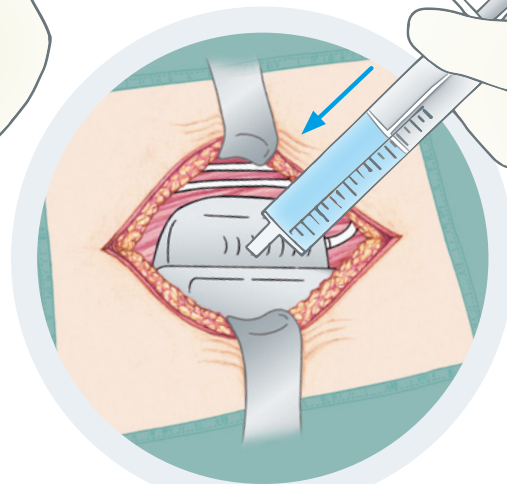


Illustration © Insa Brüning


10

Dopo il posizionamento definitivo di tutti i componenti, irrigare il sito chirurgico con **TauroPace™**.

11

Rimuovere l'eccesso di **TauroPace™**.

DOPO SUTURA DELLA CUTE:

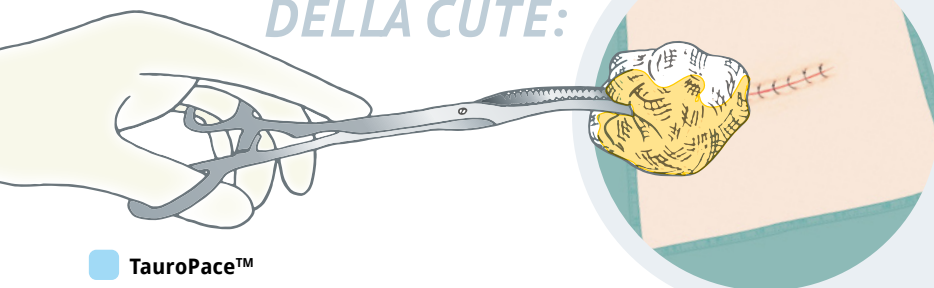

1

Disinfettare la cute con antisettico raccomandato.

2

Applicare una medicazione sterile alla ferita.

Utilizzare un flacone di **TauroPace™** per procedura.

 **TauroPace™**
 soluzione antisettica