


TauroPace™

Posizionamento S-ICD


ISTRUZIONI
STEP BY STEP

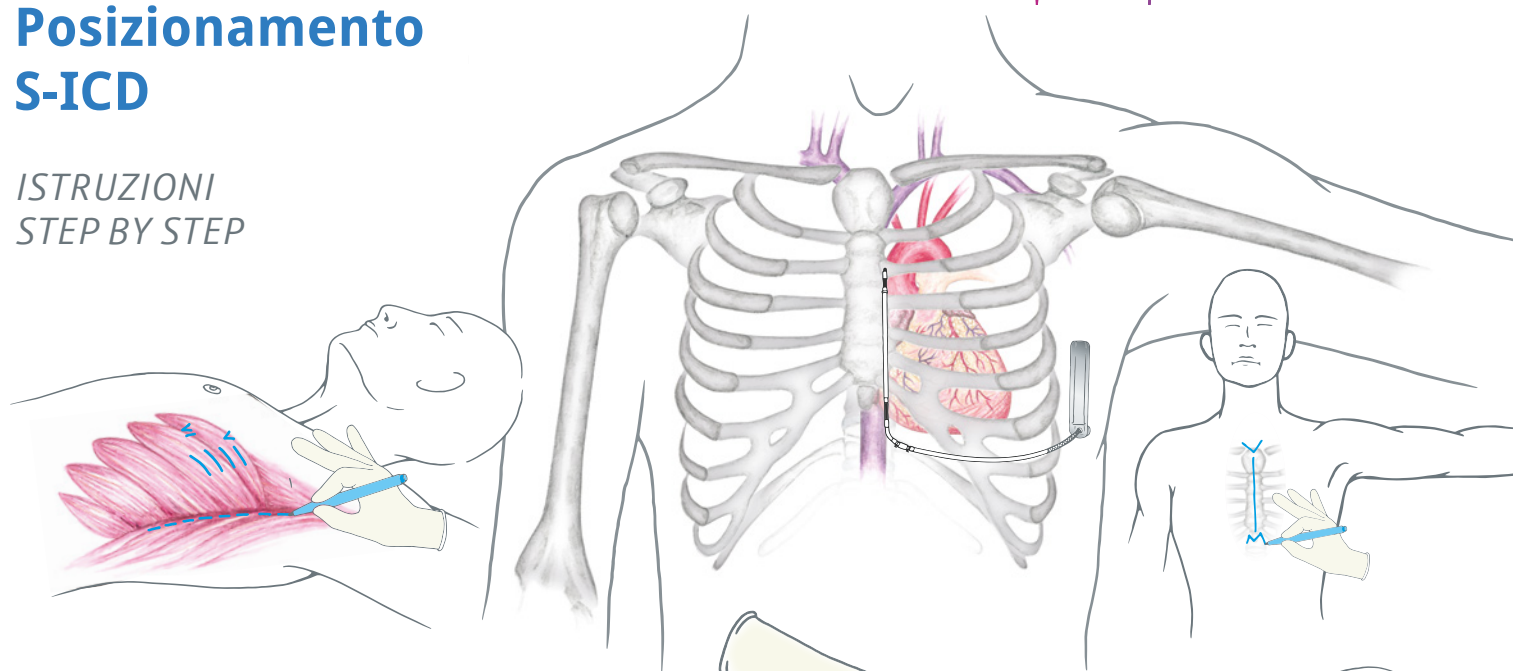

PREPARAZIONE:

1

La preparazione chirurgica della cute deve essere eseguita immediatamente prima dell'inizio della procedura con una soluzione antisettica raccomandata (considerare il blocco del piano fasciale per l'anestesia locale).

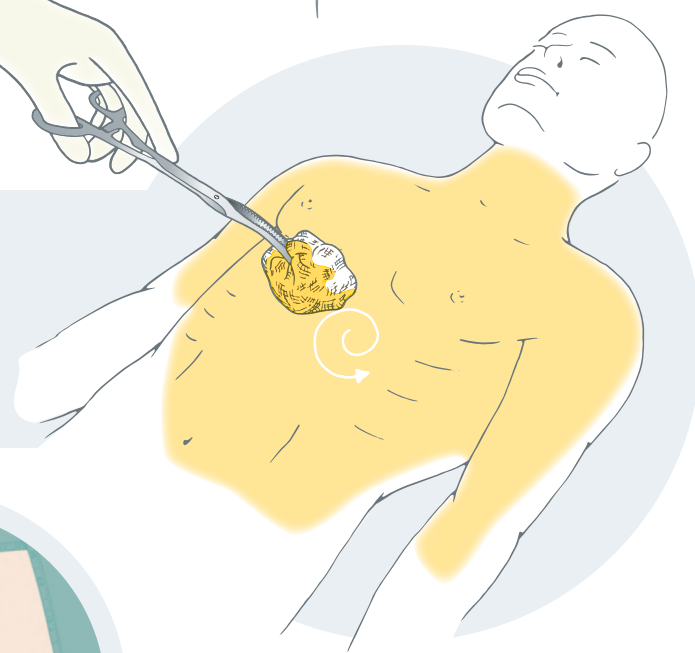


2

Predisporre telo chirurgico sul paziente.



3

Trasferire **TauroPace™** in contenitore sterile contenente tamponi chirurgici.

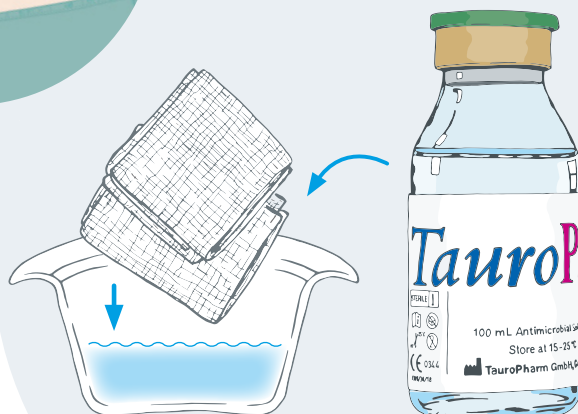


 **TauroPace™**

 soluzione antisettica




1

Incidere all'estremità caudale dello xifoide. Inumidire i fili di sutura con **TauroPace™**.

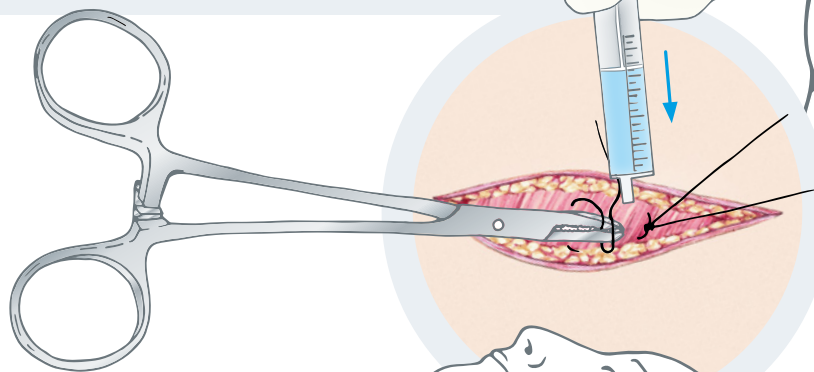

2


Preparare la tasca del generatore in una posizione appropriata. Inumidire i fili di sutura con **TauroPace™**.




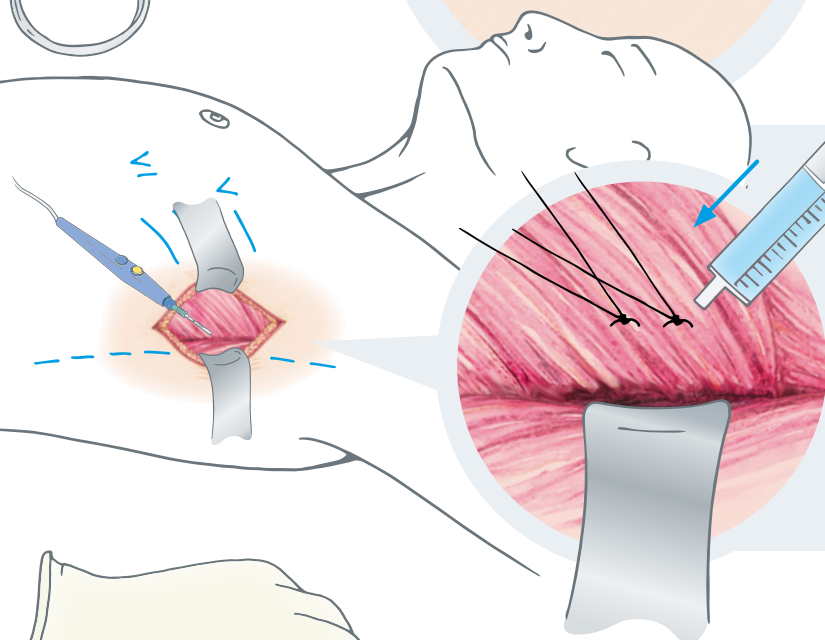


3

Eeguire tunnellizzazione dall'incisione nell'area xifoidea verso la tasca del generatore con trocar frizionato con un tampone imbevuto di **TauroPace™**.

Mentre si ritira l'elettrocatteter, pulirlo contemporaneamente con un tampone imbevuto di **TauroPace™**.

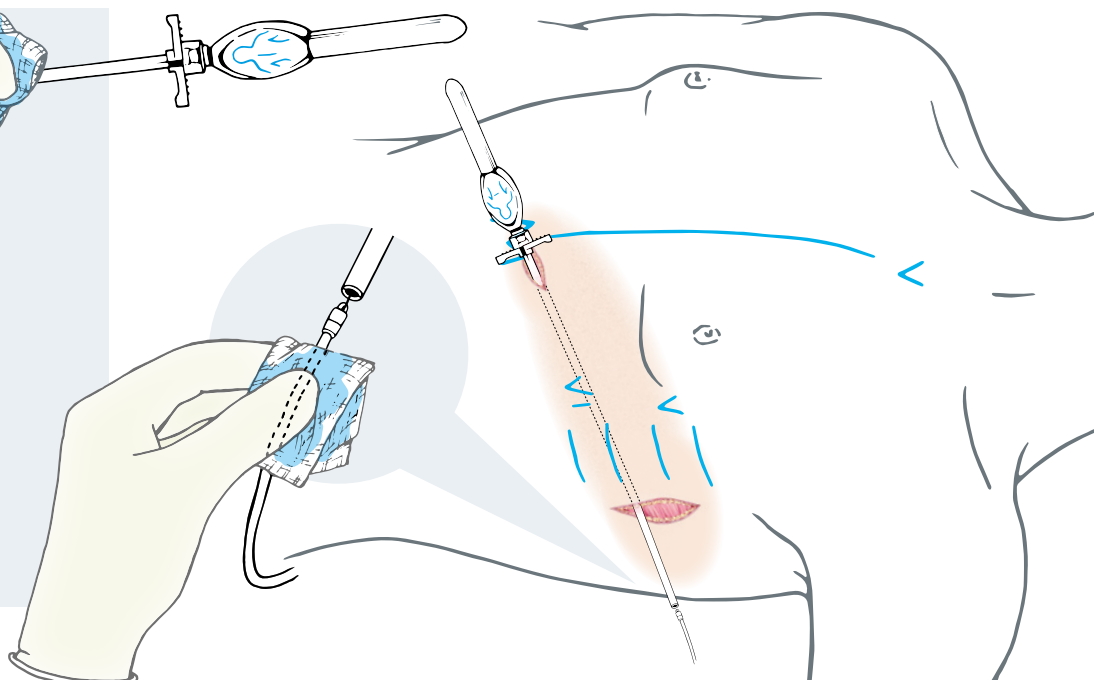

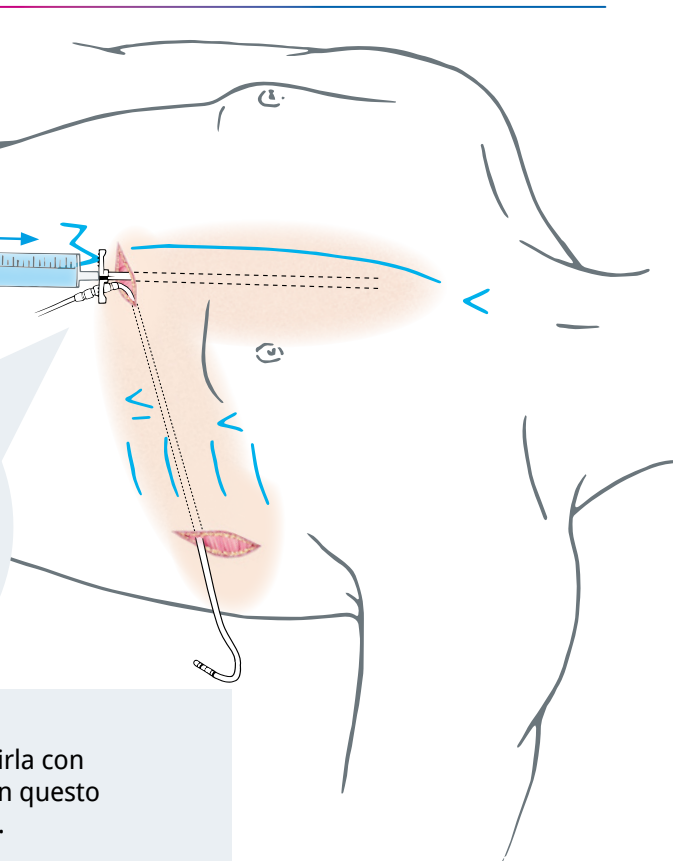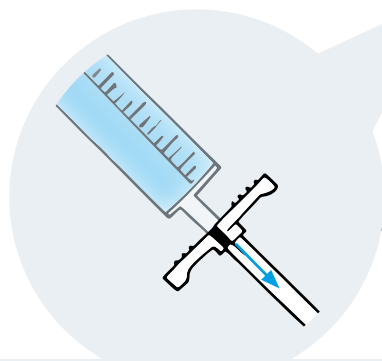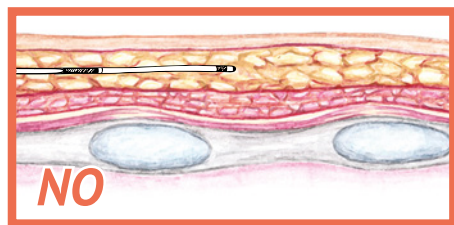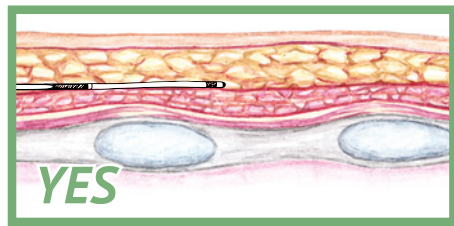


4

Dopo aver inserito la guaina in posizione sottocutanea, riempirla con **TauroPace™** fino a quando l'eccesso fuoriesce dalla guaina. In questo modo il **TauroPace™** impedisce l'entrata di aria nel sottocute.

Impiantare la bobina d'urto in posizione sternale.


5

Fissare l'elettrocattetero alla guaina di fissaggio nell'area di incisione (xifoide) e inumidire i componenti con **TauroPace™**. Staccare la guaina.

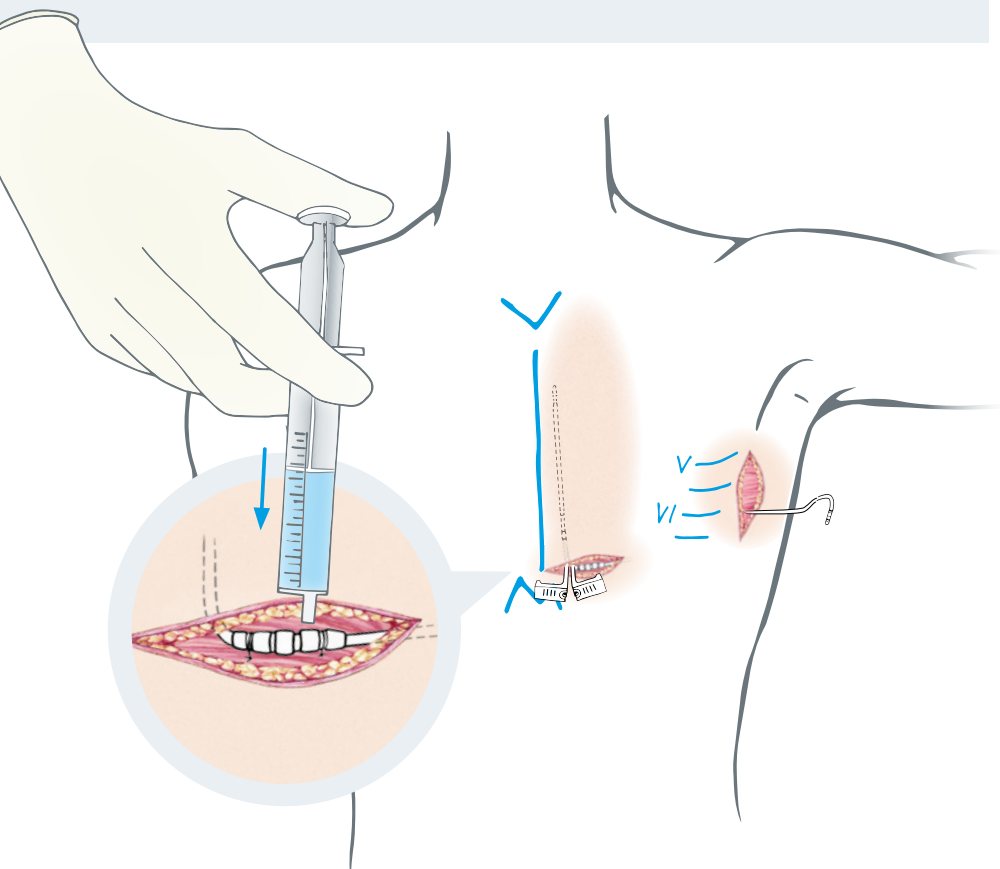


6

Pulire il nuovo generatore con un tampone imbevuto di **TauroPace™**.

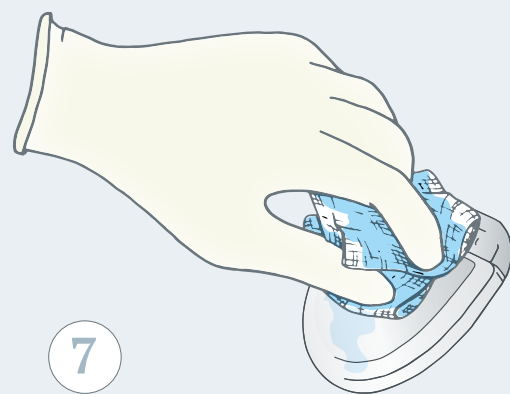

7

Immergere la chiave dinamometrica in **TauroPace™**.

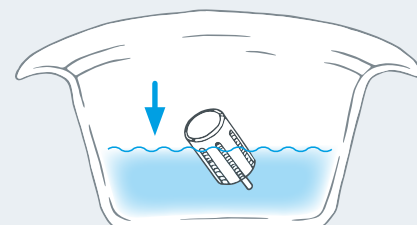



8

Collegare l'elettrocattetere (i) al generatore; utilizzare i tamponi imbevuti di **TauroPace™**.


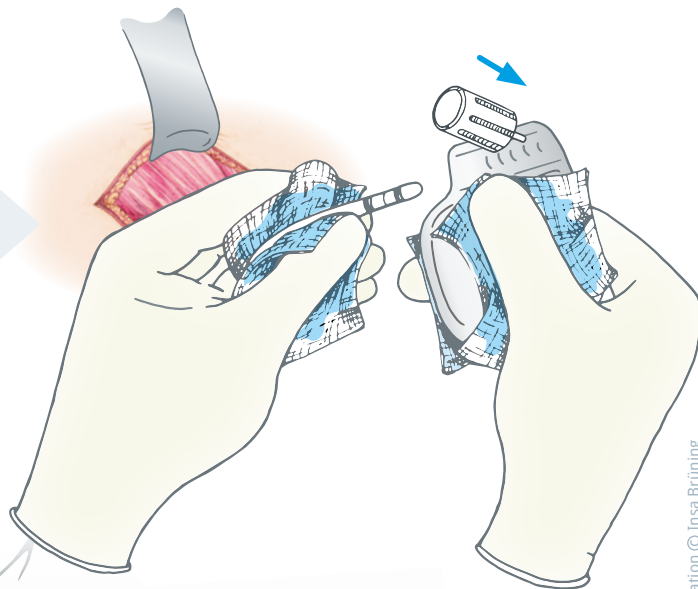


Illustration © Insa Brünig

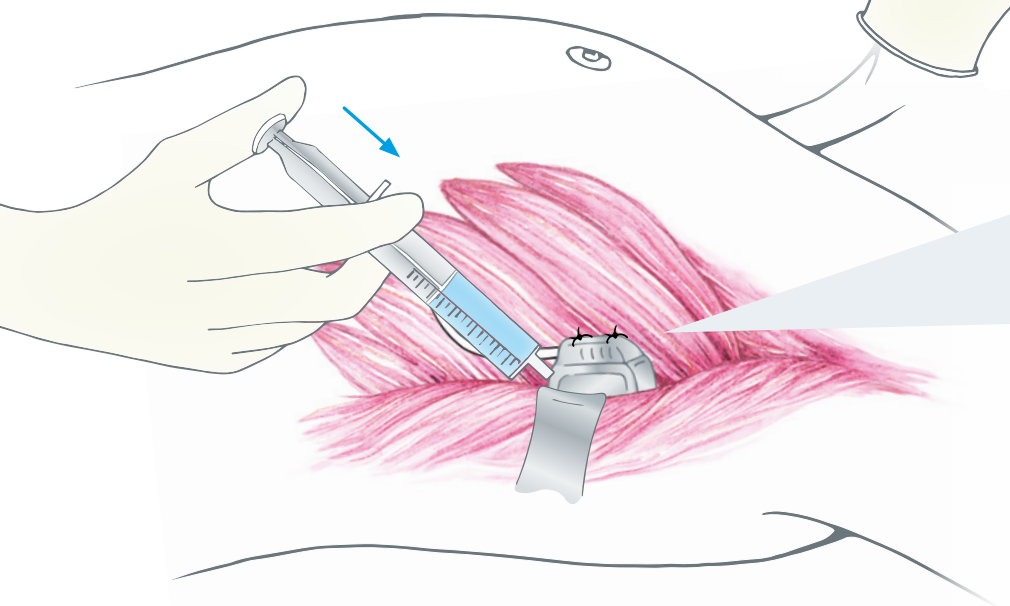

9

Con il **TauroPace™** rimanente inumidire la tasca, il generatore fissato si posizionerà in modo ottimale.

10

Rimuovere l'eccesso di **TauroPace™**.

 **TauroPace™**
 soluzione antisettica

DOPO SUTURA DELLA CUTE:


1

Disinfettare la cute con antisettico raccomandato.

2

Applicare una medicazione sterile alla ferita.

Utilizzare un flacone di **TauroPace™** per procedura.

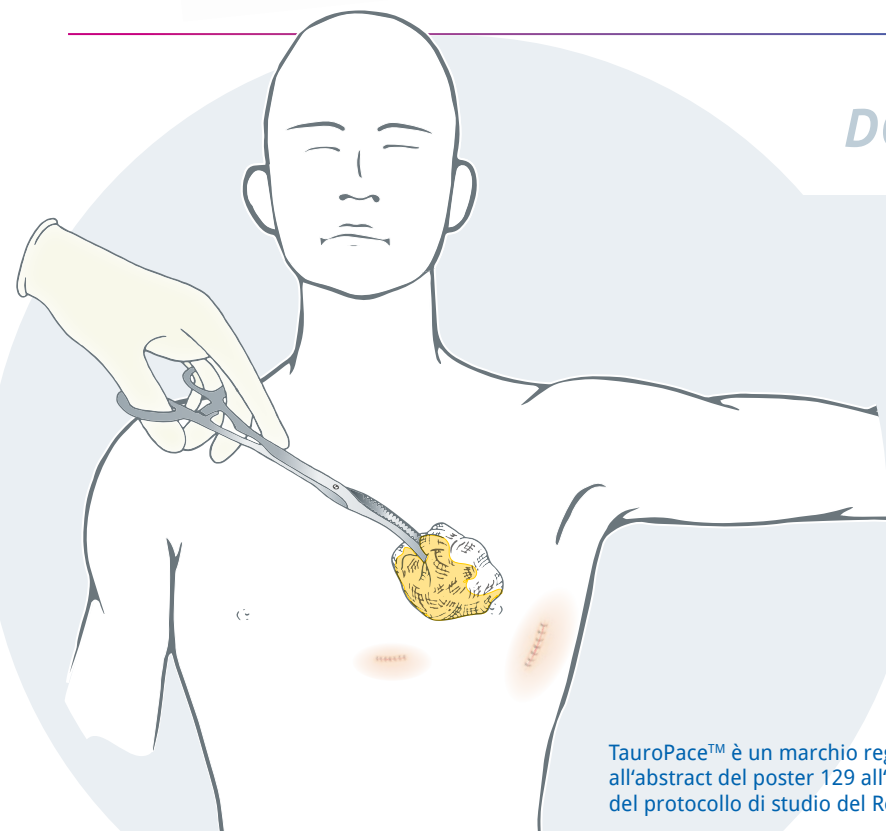

TauroPace™ è un marchio registrato di Tauropharm GmbH; questa SOP si riferisce all'abstract del poster 129 all'Heart Rhythm Congress (HRC) 2022. Questa SOP fa parte del protocollo di studio del Registro Europeo TauroPace™ identificatore **NCT04735666**.