

TauroPaceTM




Sostituzione o revisione del generatore

ISTRUZIONI
STEP BY STEP

PREPARAZIONE:

1

La preparazione chirurgica della cute deve essere eseguita immediatamente prima dell'inizio della procedura con una soluzione antisettica raccomandata (considerare il blocco del piano fasciale per l'anestesia locale).

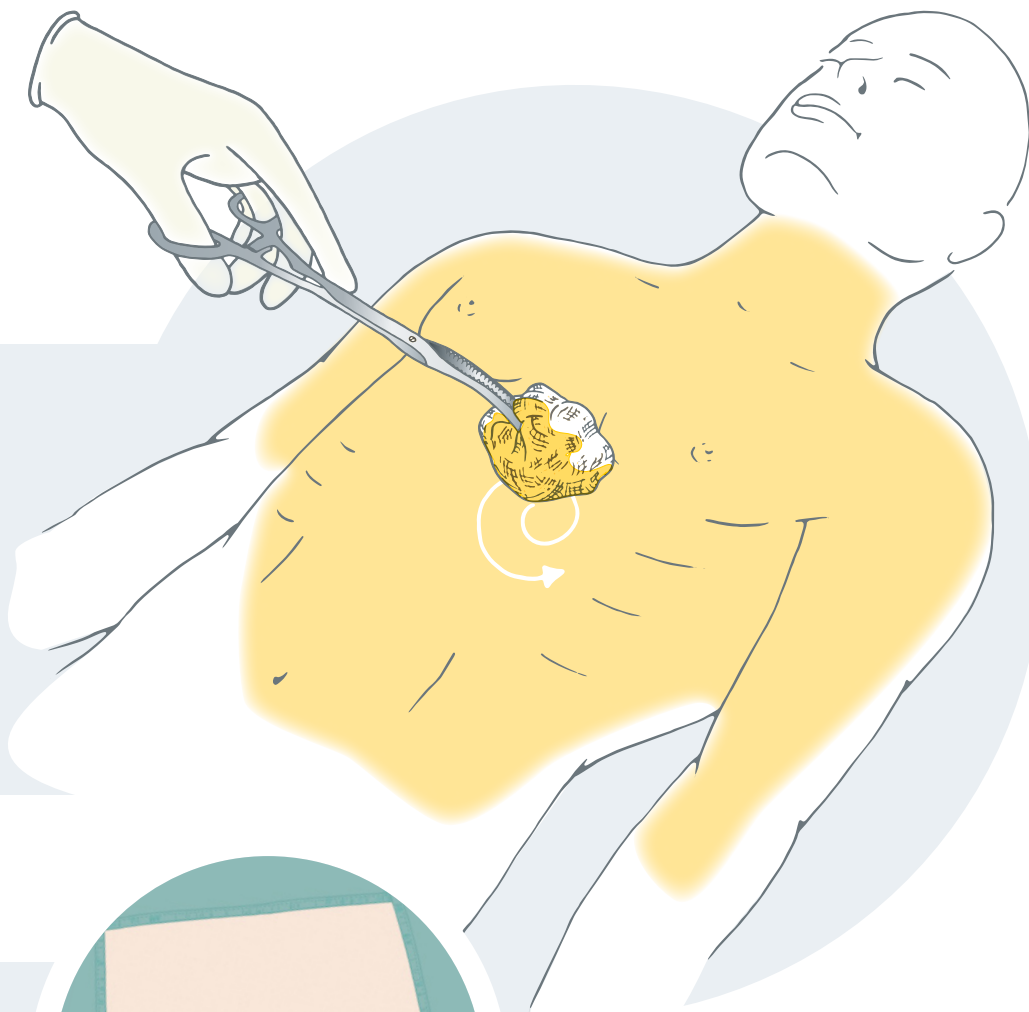


2

Predisporre telo chirurgico sul paziente.





3

Trasferire **TauroPaceTM** in contenitore sterile contenente tamponi chirurgici.

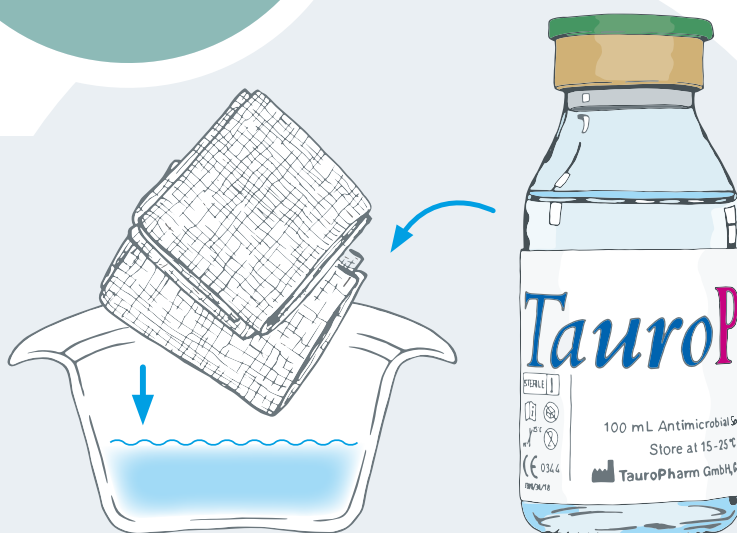


 **TauroPaceTM**

 soluzione antisettica

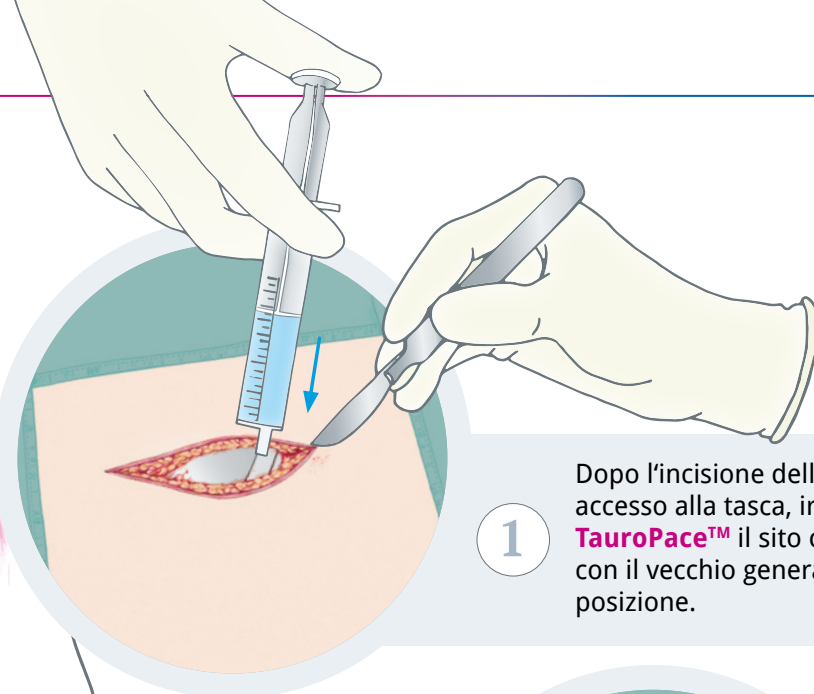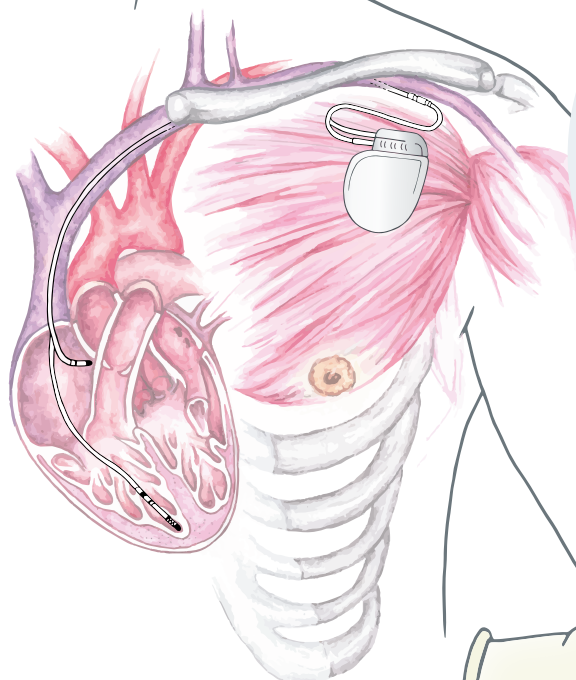


1

Dopo l'incisione della cute e accesso alla tasca, irrigare con **TauroPace™** il sito chirurgico con il vecchio generatore in posizione.

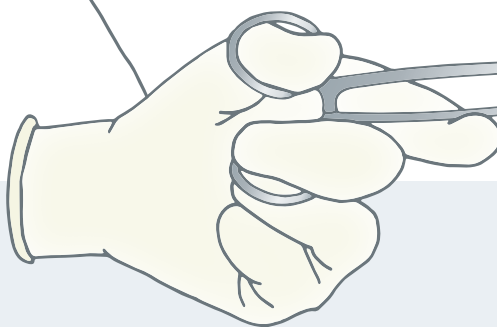


2

Rimuovere il vecchio generatore.

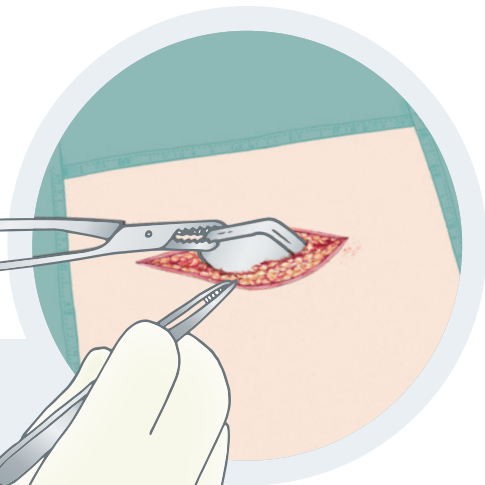


3

Immergere la chiave dinamometrica in **TauroPace™**.

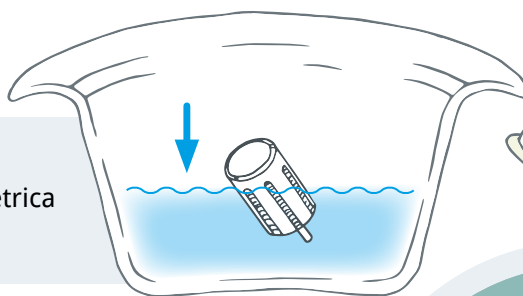


4

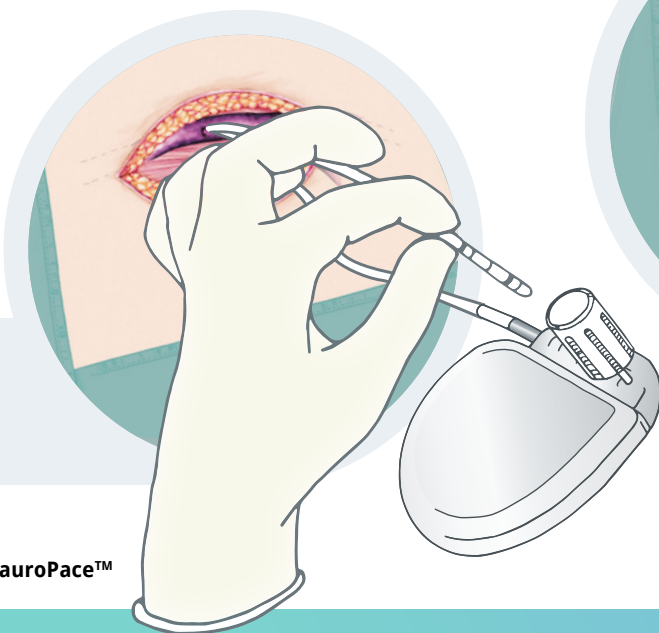


5

Scollegare il vecchio generatore, frizionare i vecchi elettrocateteri con tampone imbevuto di **TauroPace™** e irrigare il sito chirurgico con **TauroPace™**.

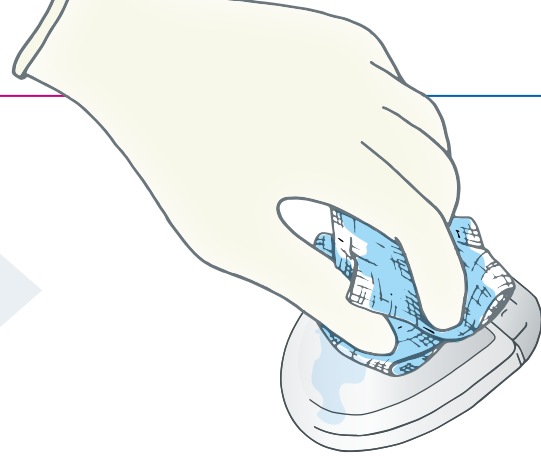

6

Frizionare il nuovo generatore con un tampone imbevuto di **TauroPace™**.

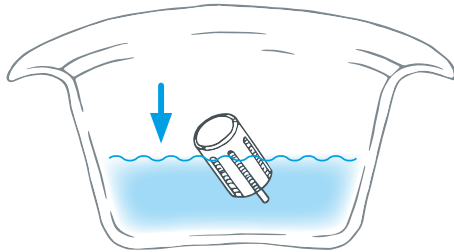


7


Immergere la chiave dinamometrica in **TauroPace™**.

8

Collegare l'elettrocattetere (i) al generatore; utilizzare i tamponi imbevuti di **TauroPace™**.

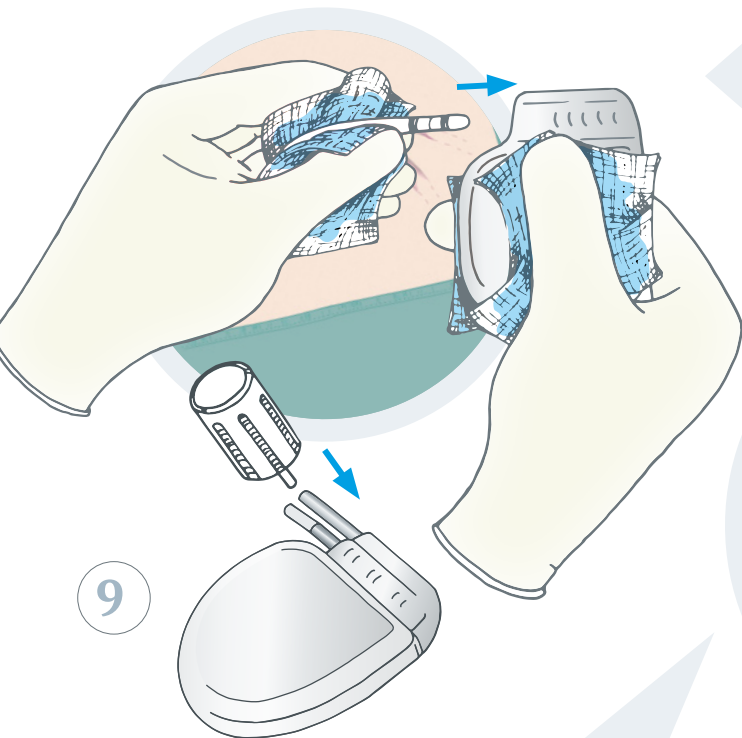

9

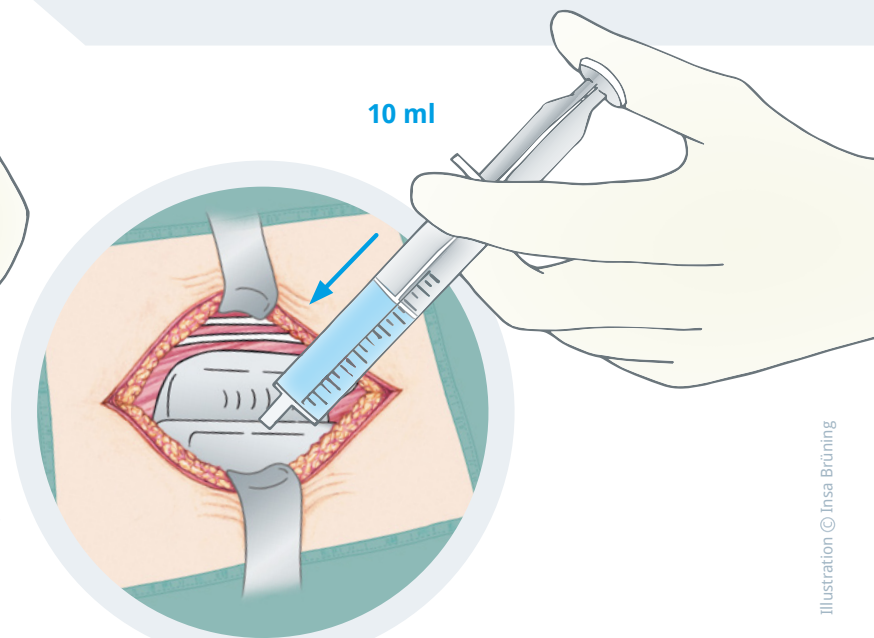


10

Dopo il posizionamento definitivo di tutti i componenti, irrigare il sito chirurgico con **TauroPace™**.

11

Rimuovere l'eccesso di **TauroPace™**.

DOPO SUTURA DELLA CUTE:

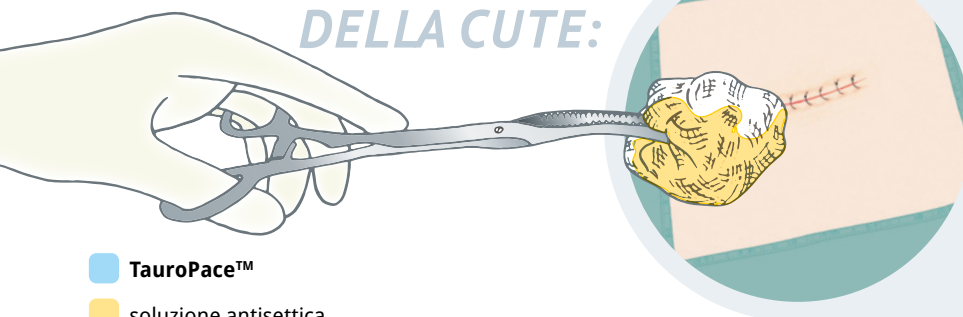

1

Disinfettare la cute con antisettico raccomandato.

2

Applicare una medicazione sterile alla ferita.

Utilizzare un flacone di **TauroPace™** per procedura.

TauroPace™
 soluzione antisettica