


Colocación de DECI

INSTRUCCIONES PASO A PASO

PREPARACIÓN:

1

La preparación quirúrgica de la piel debe realizarse en el periodo inmediatamente anterior del inicio del procedimiento, usando una solución antiséptica recomendada (considerar un bloqueo del plano fascial como anestesia local).

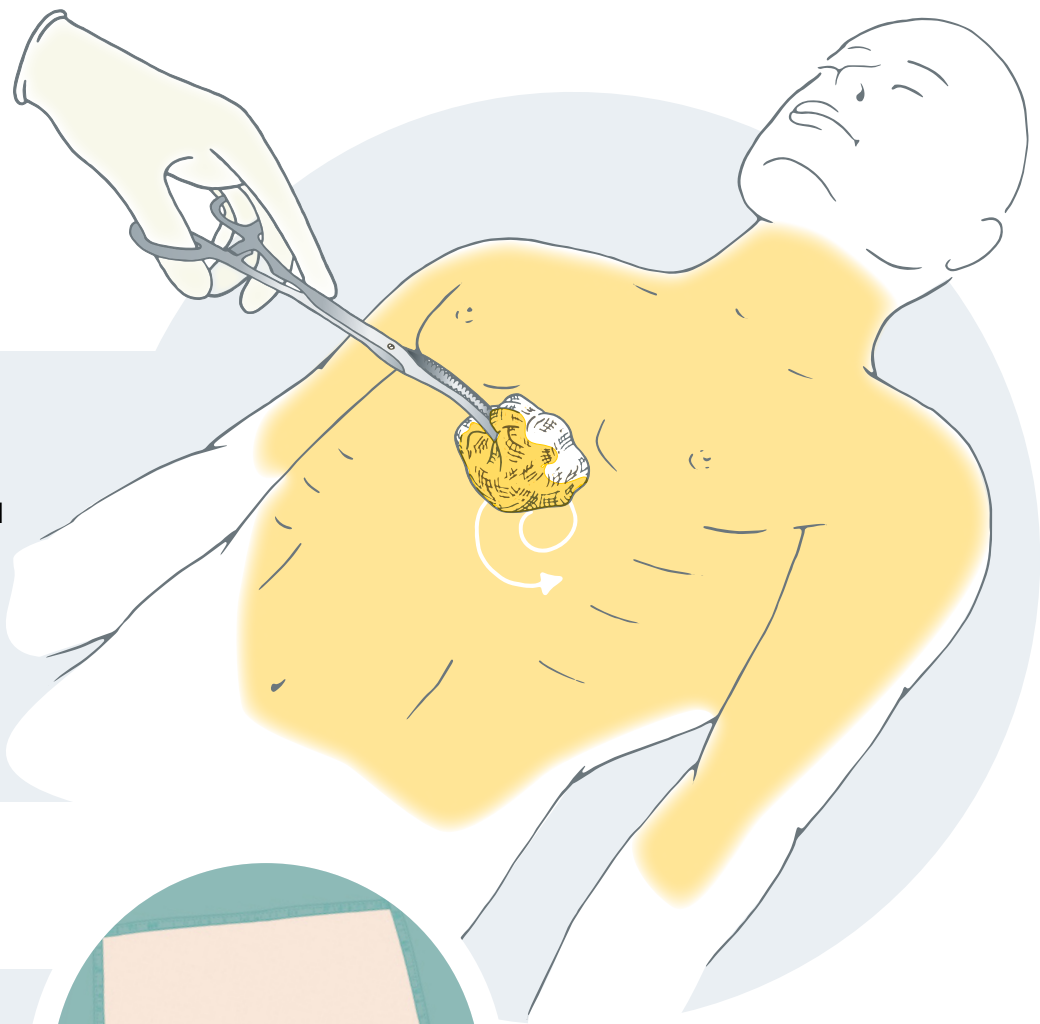


2

Cubra al paciente con campos estériles.



3

Añada **TauroPace™** a una batea con compresas quirúrgicas estériles.

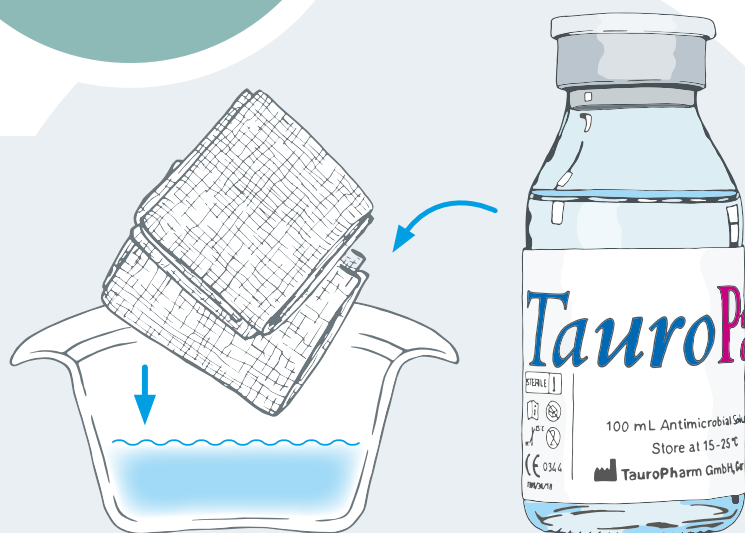




1


Después de realizar la incisión en la piel y obtener acceso/preparar la vena, limpie la vaina/dilatador con **TauroPace™** antes de su colocación.

5 ml

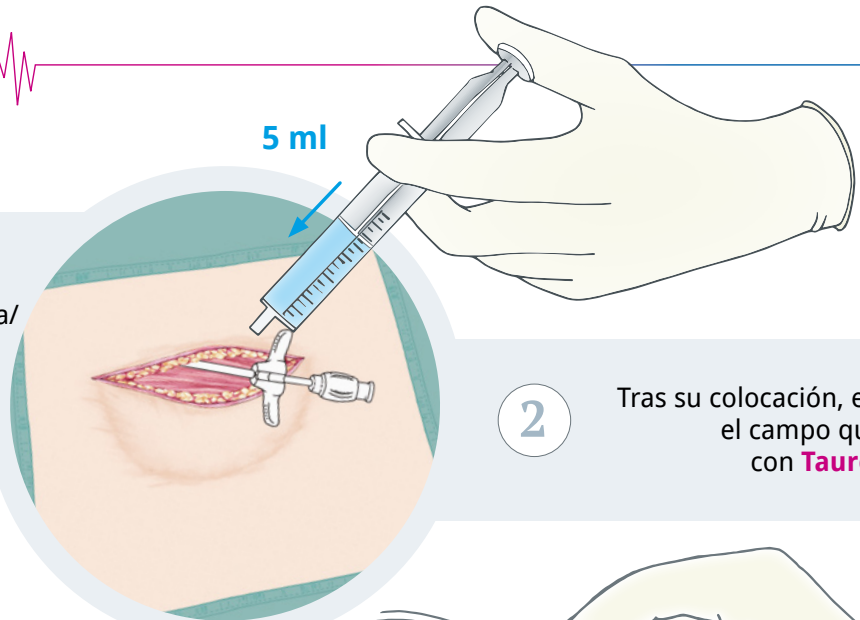

2

Tras su colocación, enjuague el campo quirúrgico con **TauroPace™**.

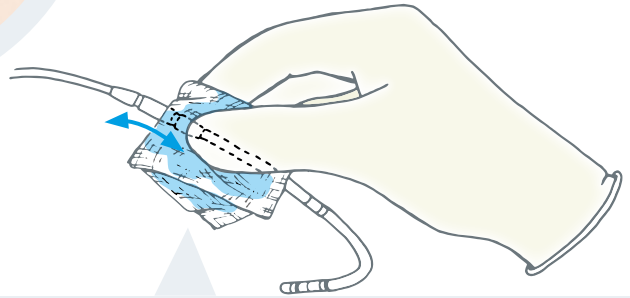


3

Limpie el electrodo con una compresa estéril empapada en **TauroPace™** antes de colocarlo. Asegúrese de movilizar la manga de sutura con una compresa empapada en **TauroPace™** (importante).


4

Coloque la manga de sutura en su posición final utilizando una compresa empapada en **TauroPace™**.

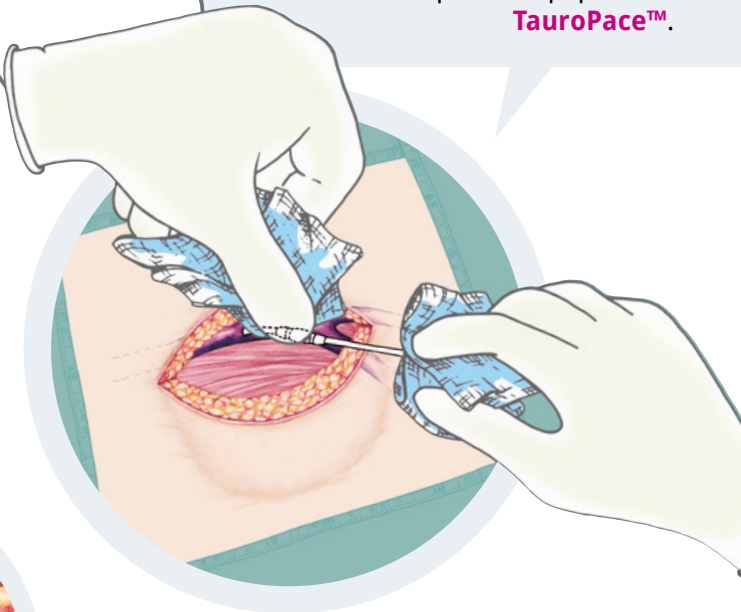


5

Después de la colocación del/de los electrodos, enjuague el campo quirúrgico con **TauroPace™**.

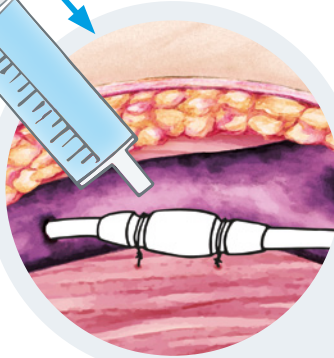


5 ml

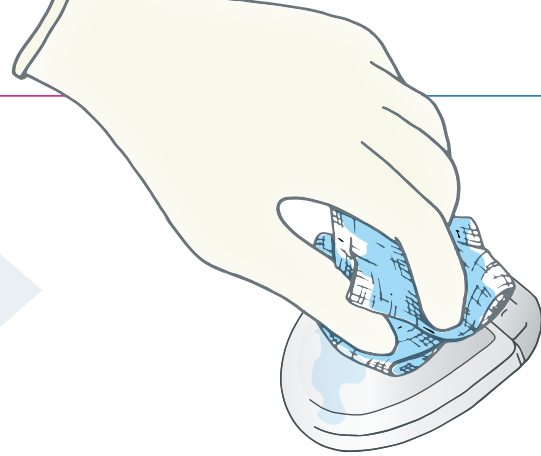

6

Limpe el nuevo generador usando compresas empapadas en **TauroPace™**.

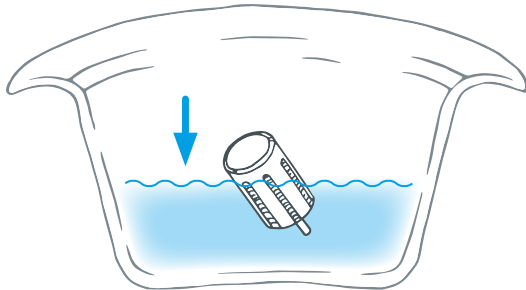


7

Sumerja la llave dinanométrica en **TauroPace™**.

8

Conecte el / los electrodos al generador; sujetando ambos usando compresas empapadas en **TauroPace™**.

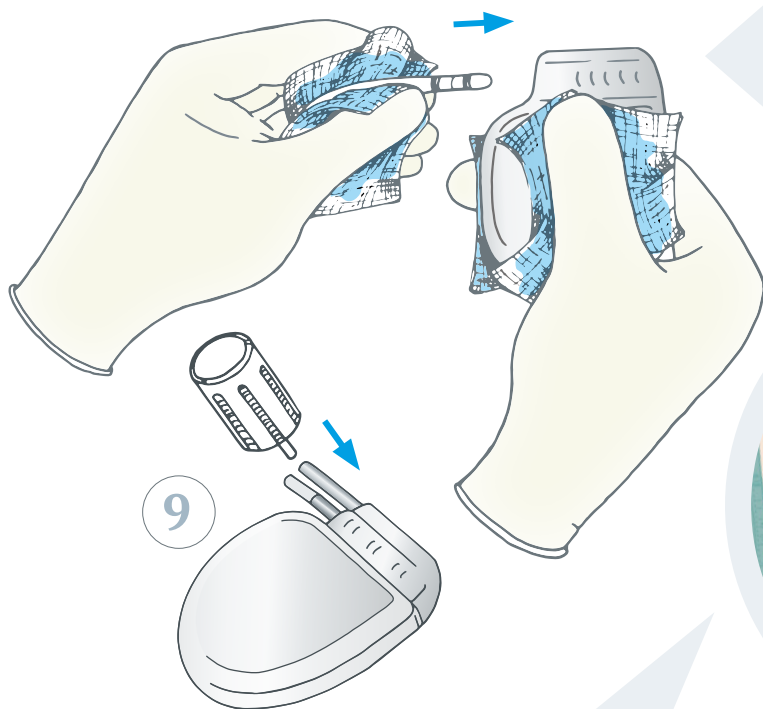

10 ml

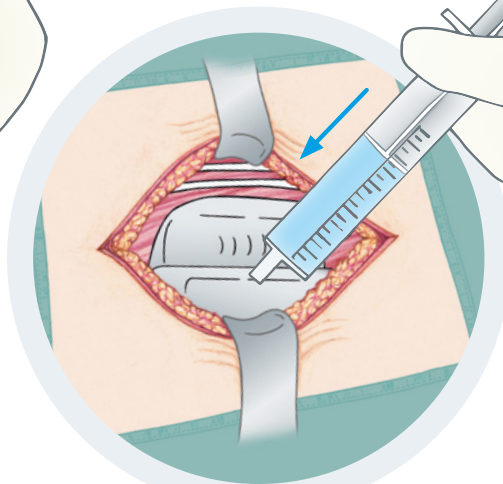


Illustration © Insa Brünig


10

Tras la colocación del dispositivo, enjuague el campo quirúrgico con **TauroPace™**.

11

Elimine el exceso **TauroPace™**.

TRAS EL CIERRE DE LA PIEL:

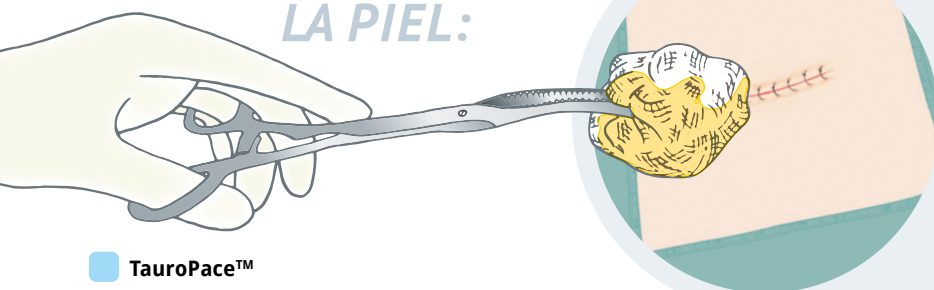

1

Después del cierre cutáneo, limpie con la solución antiséptica recomendada.

2

Aplique un apósito estéril a la herida.

Use un vial de **TauroPace™** por procedimiento.

- TauroPace™
- Solución antiséptica