




Implantation d'un dispositif électronique cardiaque implantable (stimulateur, défibrillateur)

INSTRUCTIONS
ÉTAPE PAR ÉTAPE

PRÉPARATION:

1

La préparation chirurgicale de la peau doit être effectuée le plus proche possible du début de l'intervention avec une solution antiseptique recommandée (envisager une anesthésie locale dédiée).

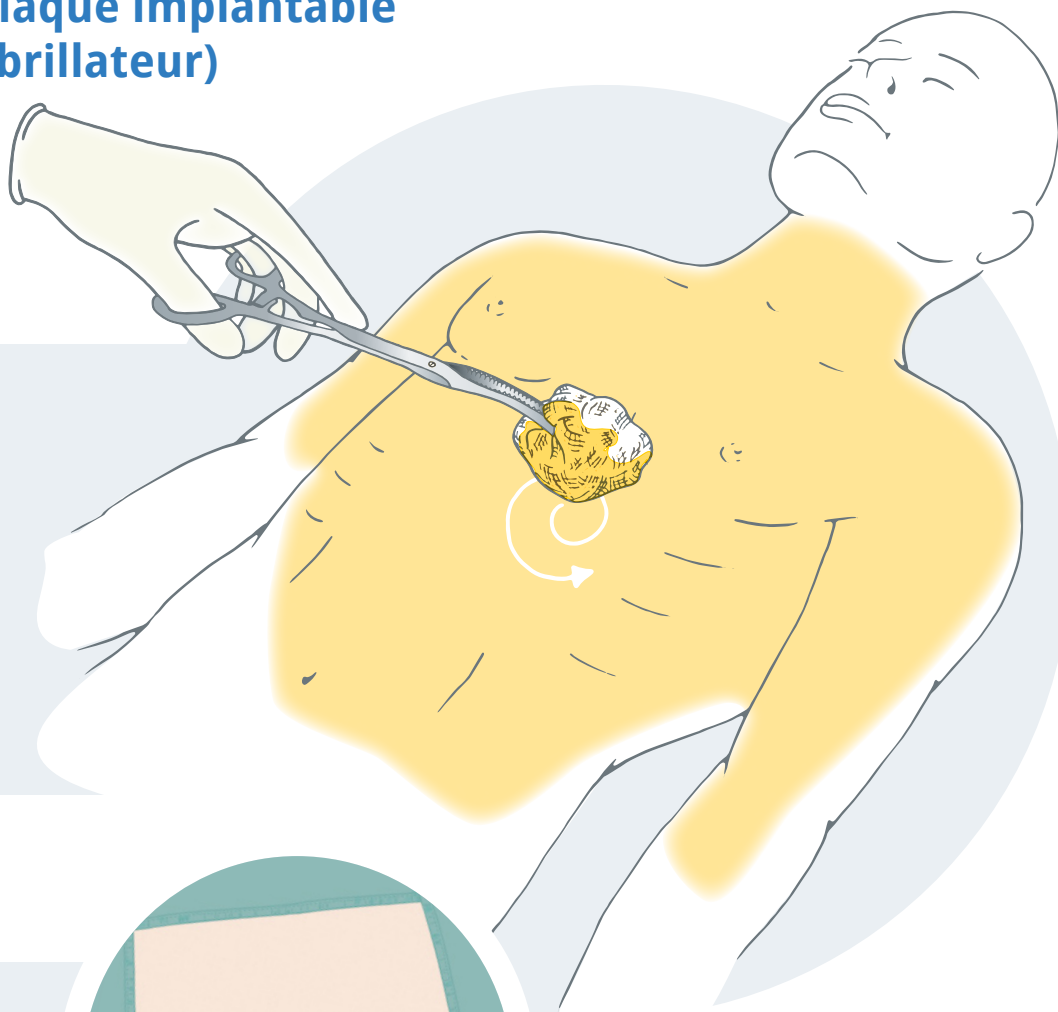


2

Drapage du patient.



3

Verser un flacon de **TauroPace™** dans une cupule contenant des compresses chirurgicales.

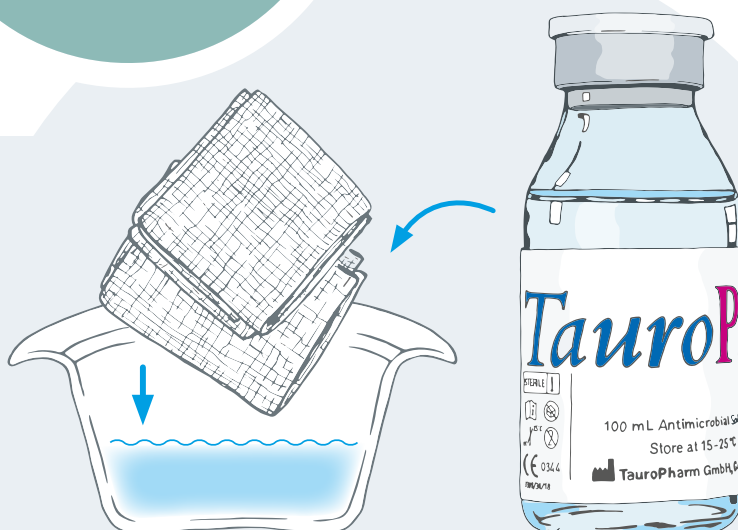

 **TauroPace™**


 Solution antiseptique



1


Après l'incision de la peau et l'accès à la veine/la préparation de celle-ci, essuyer l'introducteur avec **TauroPace™** avant sa mise en place.

5 ml

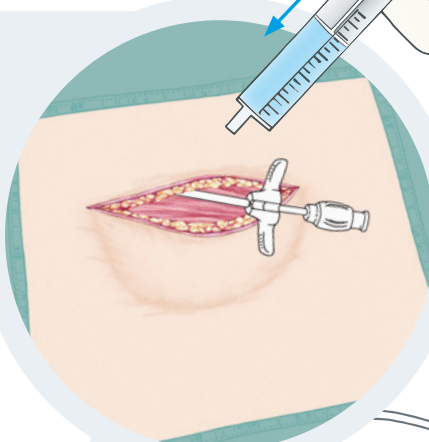

2

Après la mise en place, rincer le site chirurgical avec **TauroPace™**.

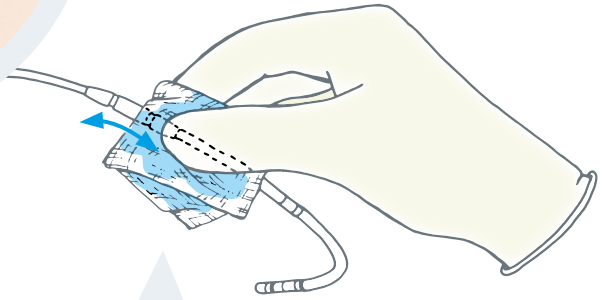


3


Essuyer l'électrode avec une compresse imbibée de **TauroPace™** avant de la placer. Veiller à mobiliser l'olive de fixation avec une compresse bien imprégnée de la solution **TauroPace™** (important).

4

Déplacez l'olive de fixation en position finale avec une compresse imbibée de **TauroPace™**.

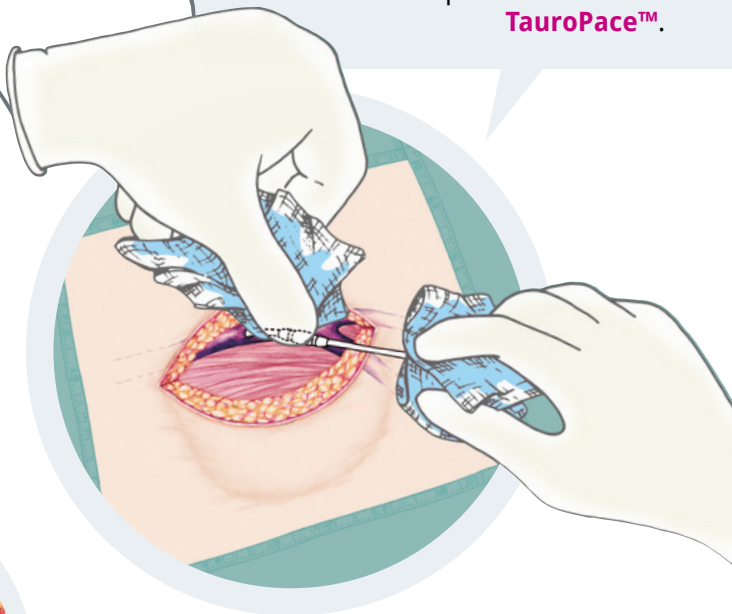


5 ml

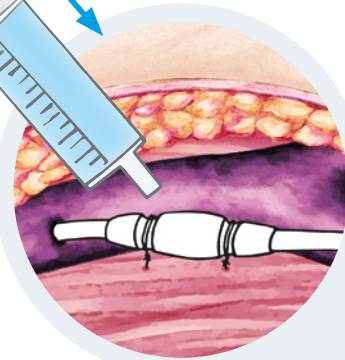


5

Après la mise en place de la ou des électrodes, rincer le site chirurgical avec **TauroPace™**.

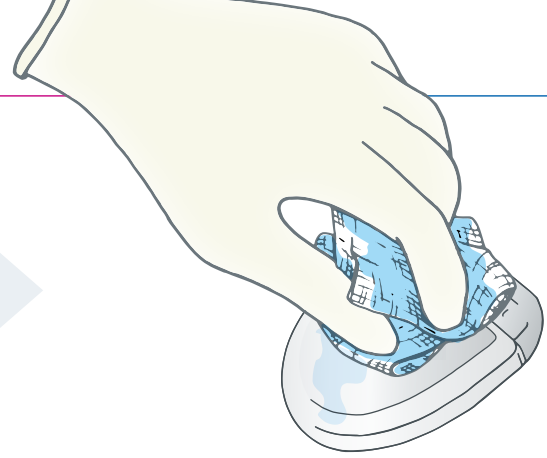

6

Essuyer le nouveau boîtier/générateur avec une compresse imbibée de **TauroPace™**.

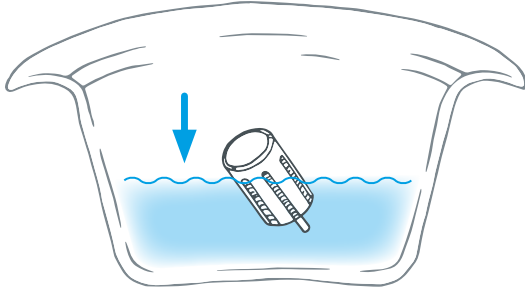


7

Immerger le tournevis dans la solution **TauroPace™**.

8

Connecter l'électrode (les électrodes) et le générateur ; utiliser des compresses imbibées de **TauroPace™** pour maintenir l'électrode et le stimulateur.

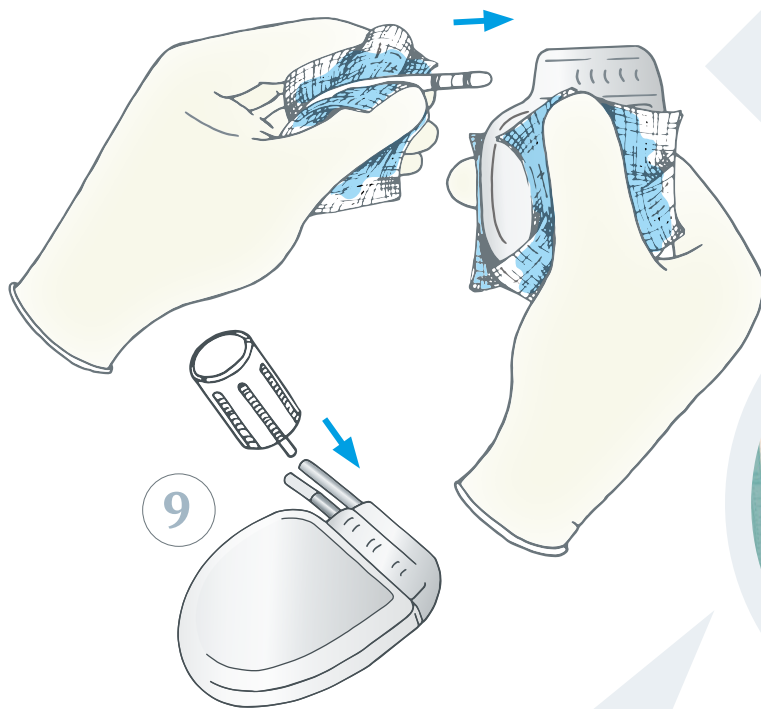

10 ml

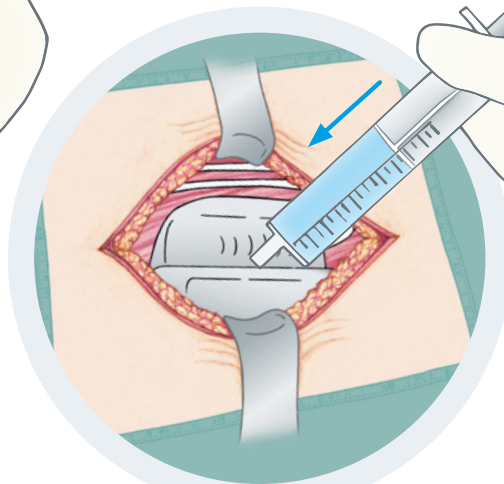


Illustration © Insa Brüning


10

Après la mise en place définitive de tout le matériel, rincer le site chirurgical avec **TauroPace™**.

11

Enlever l'excès de la solution **TauroPace™**.

APRÈS LA FERMETURE DE LA PEAU:

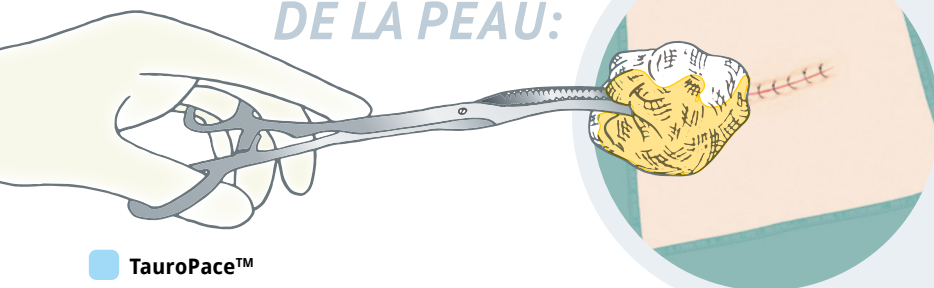

1

Après la fermeture de la peau, essuyer-la avec un antiseptique cutané recommandé.

2

Appliquer un pansement stérile sur la plaie.

Utilisez un flacon de **TauroPace™** par procédure.

TauroPace™

Solution antiseptique