




Revisión y sustitución del generador

INSTRUCCIONES PASO A PASO

PREPARACIÓN:

1

La preparación quirúrgica de la piel debe realizarse en el periodo inmediatamente anterior del inicio del procedimiento, usando una solución antiséptica recomendada (considerar un bloqueo del plano fascial como anestesia local).

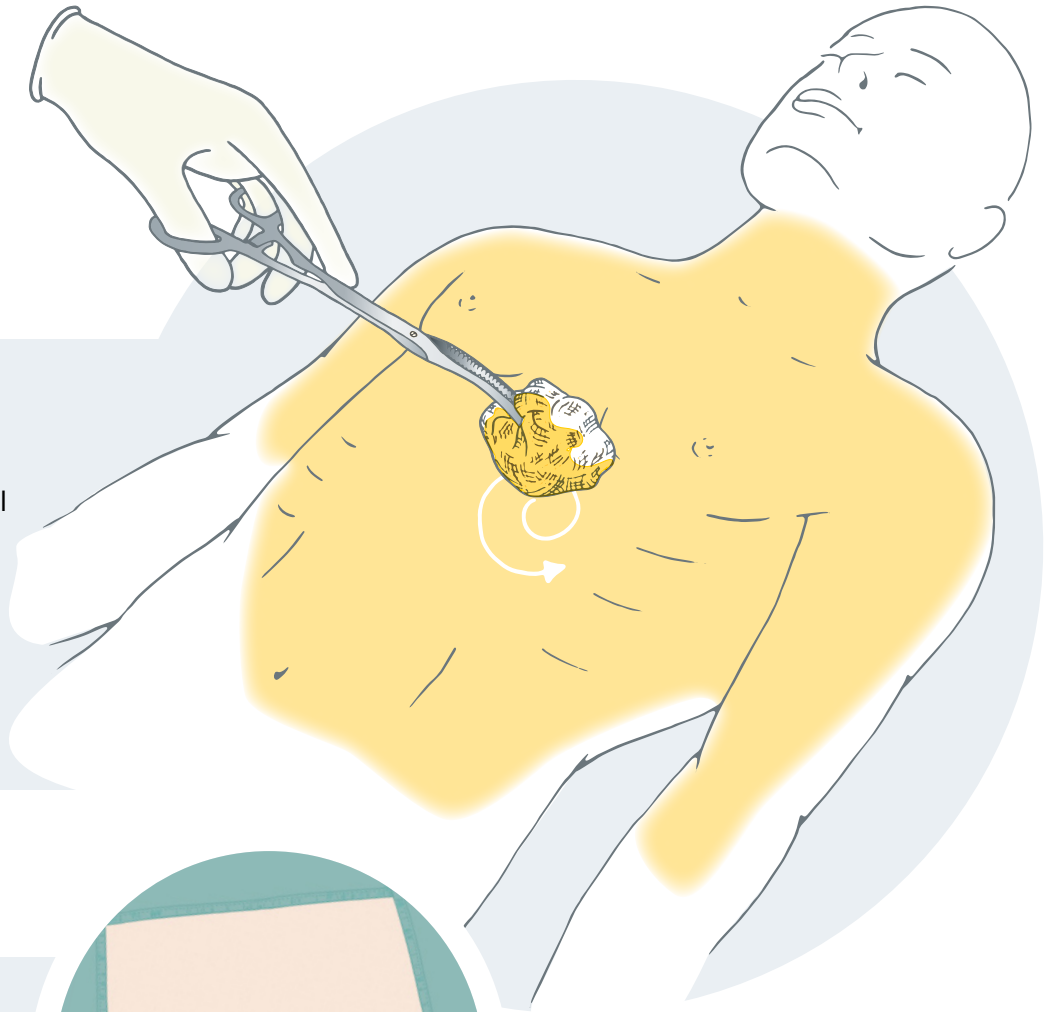


2



Cubra al paciente con campos estériles.



3


Añada **TauroPace™** a una batea con compresas quirúrgicas estériles.

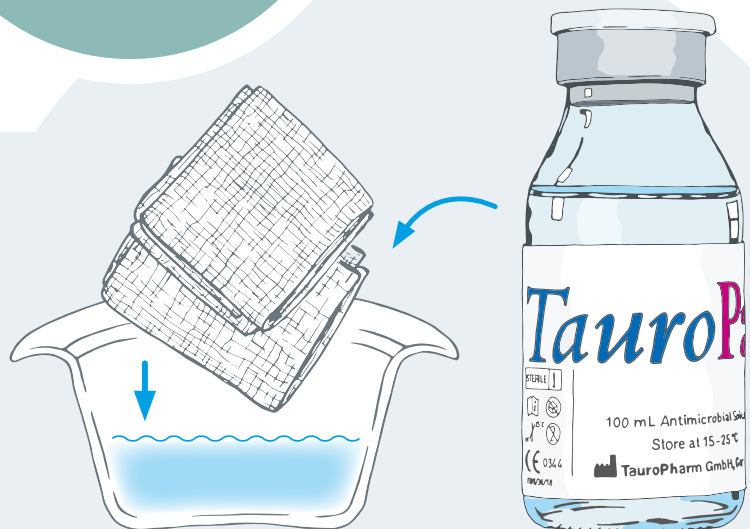

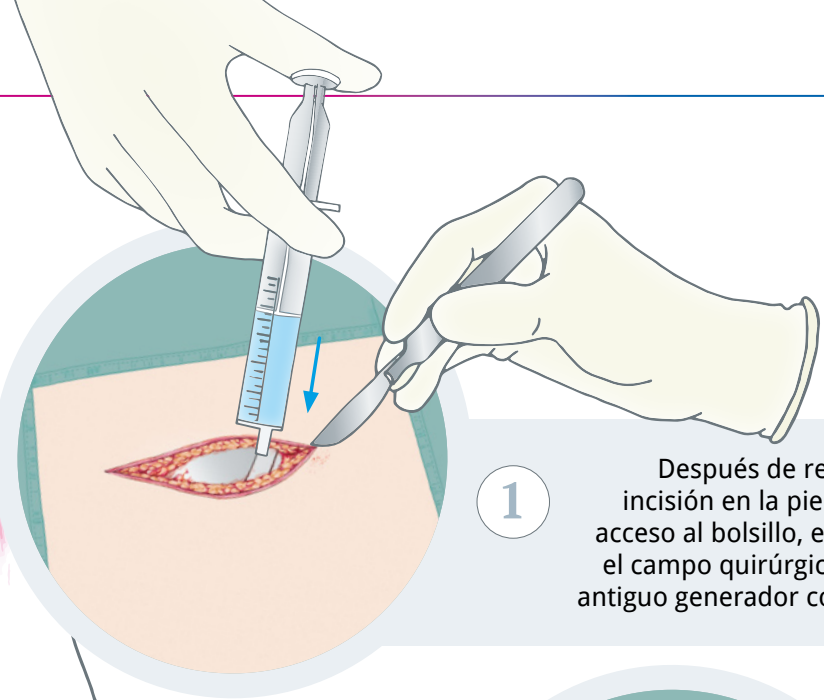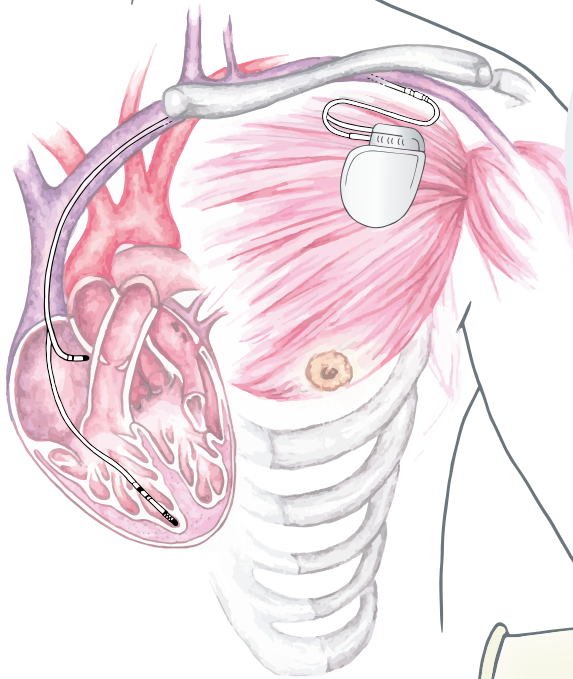


1

Después de realizar la incisión en la piel y tener acceso al bolsillo, enjuague el campo quirúrgico con el antiguo generador colocado.

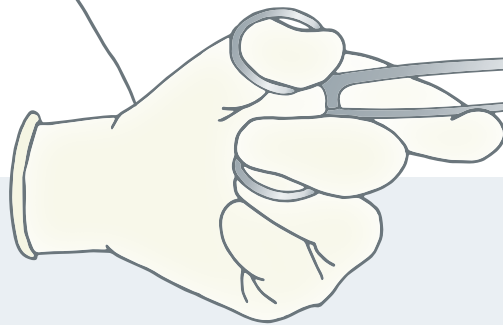


2

Retire el generador antiguo.


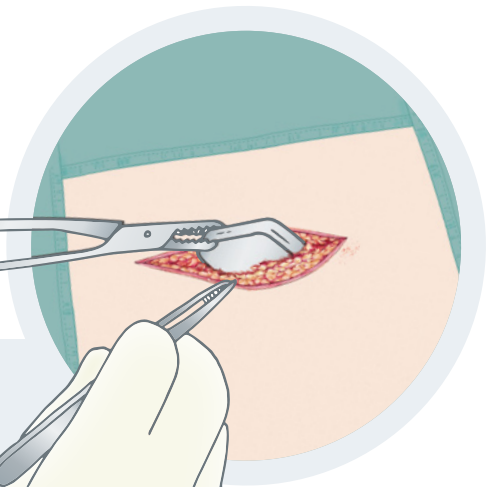


3

Sumerja la llave dinanométrica en **TauroPace™**.

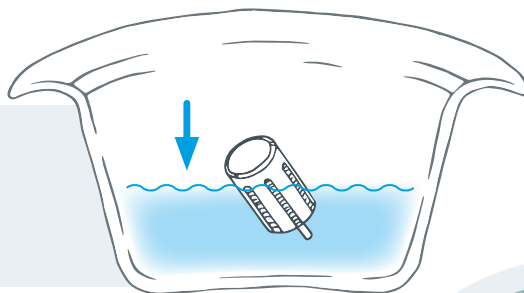


4

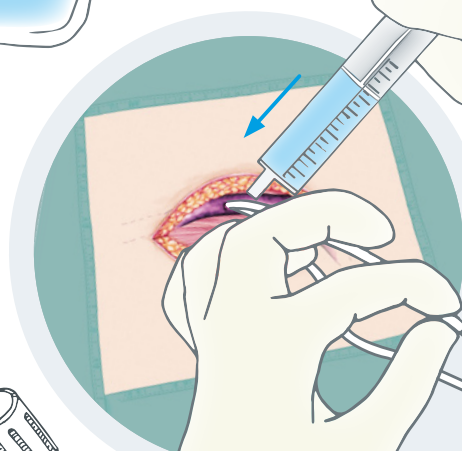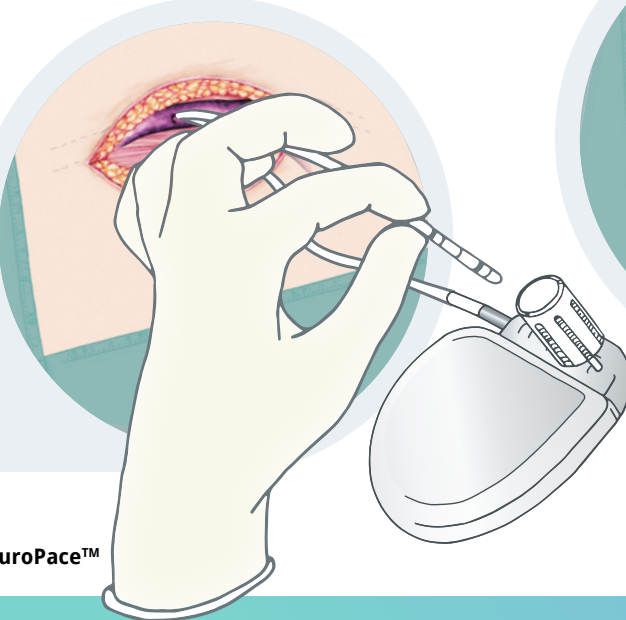


5

Desconecte los electrodos del generador antiguo, limpie los electrodos con compresas empapadas con **TauroPace™** y enjuague el campo quirúrgico con **TauroPace™**.

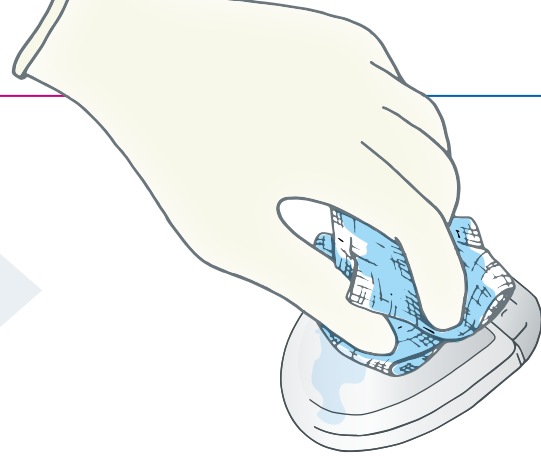

6

Limpie el nuevo generador usando compresas empapadas en **TauroPace™**.

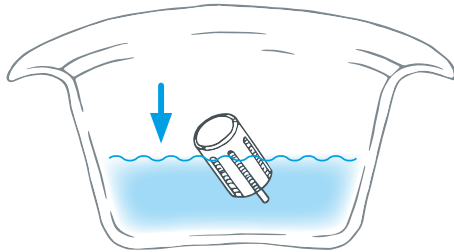


7

Sumerja la llave dinanométrica en **TauroPace™**.


8

Conecte el / los electrodos al generador; sujetando ambos usando compresas empapadas en **TauroPace™**.

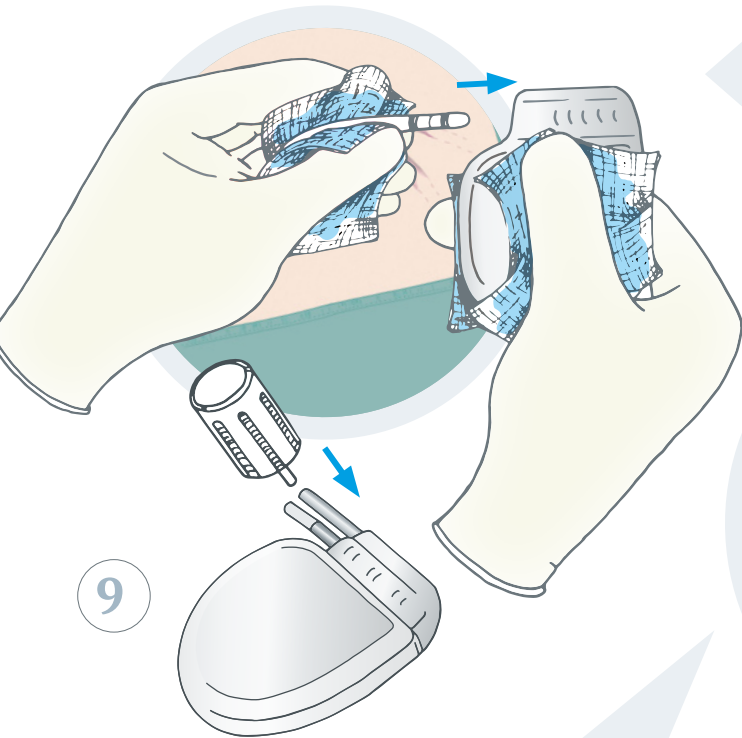

9

10 ml

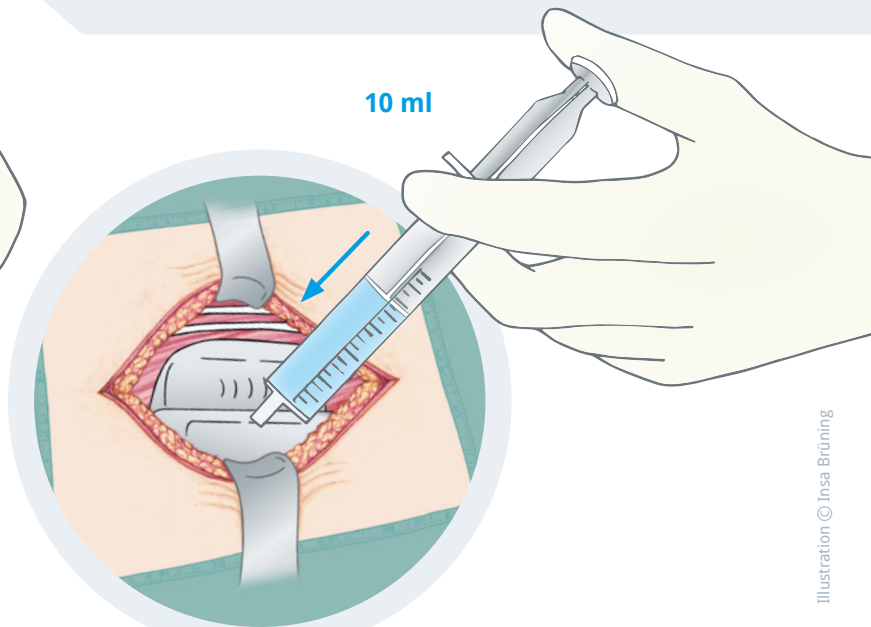


10

Tras la colocación del dispositivo, enjuague el campo quirúrgico con **TauroPace™**.

11

Elimine el exceso **TauroPace™**.

TRAS EL CIERRE DE LA PIEL:

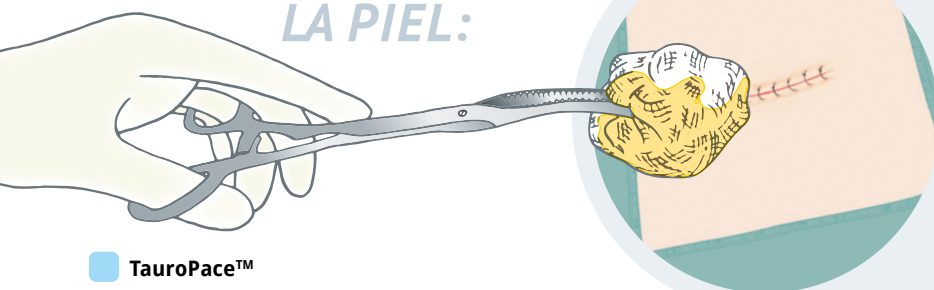

1

Después del cierre cutáneo, limpie con la solución antiséptica recomendada.

2

Aplique un apósito estéril a la herida.

Use un vial de **TauroPace™** por procedimiento.

- TauroPace™
- Solución antiséptica