




Générateur de substitution ou de révision

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

PRÉPARATION:

1

La préparation chirurgicale de la peau doit être effectuée le plus proche possible du début de l'intervention avec une solution antiseptique recommandée (envisager une anesthésie locale dédiée).

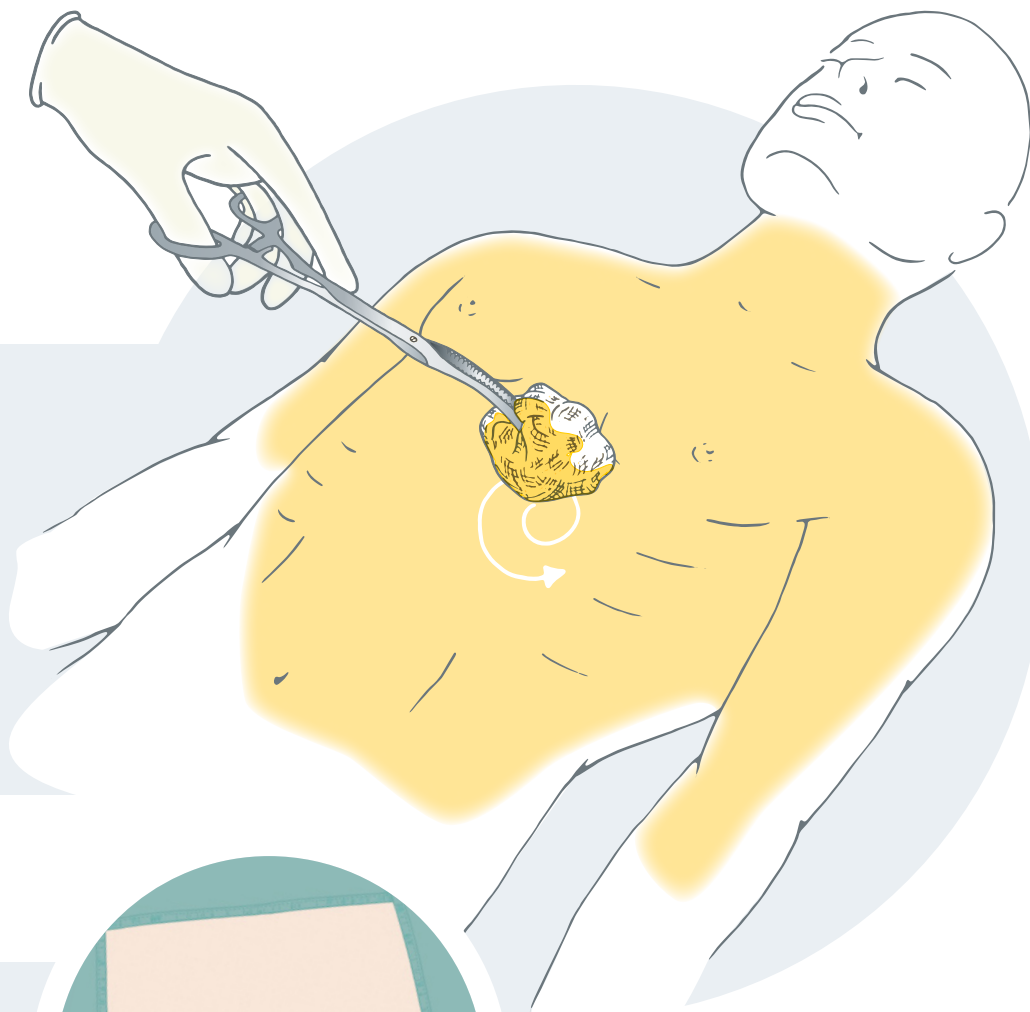


2

Drapage du patient.





3

Verser un flacon de **TauroPace™** dans une cupule contenant des compresses chirurgicales.

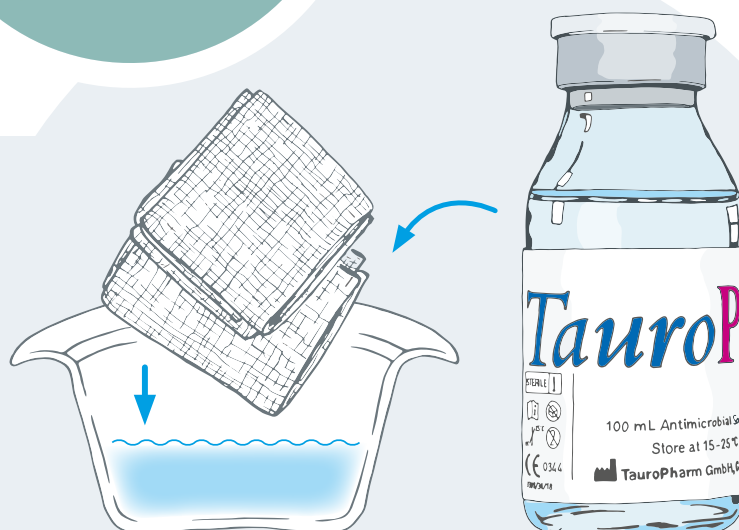



 **TauroPace™**

 Solution antiseptique

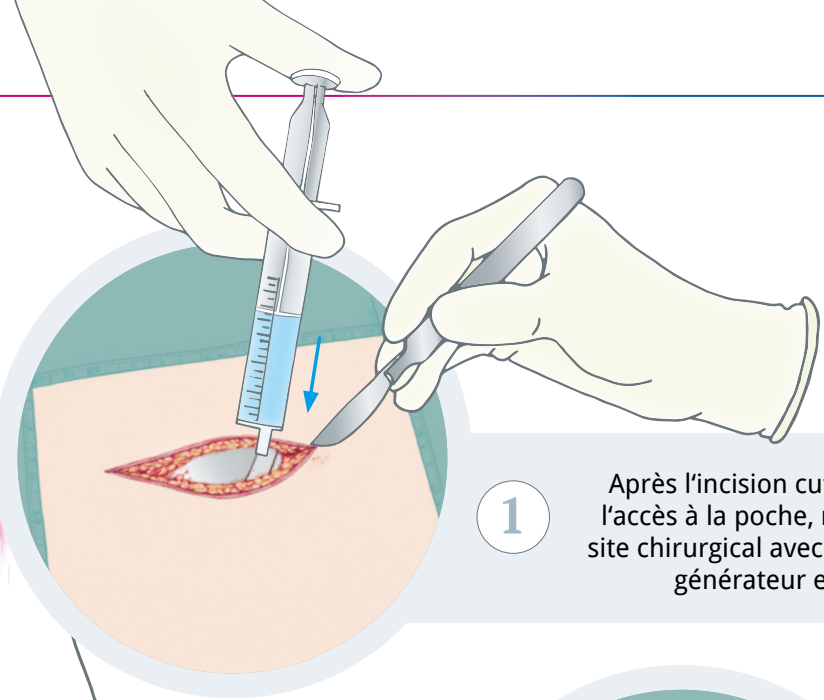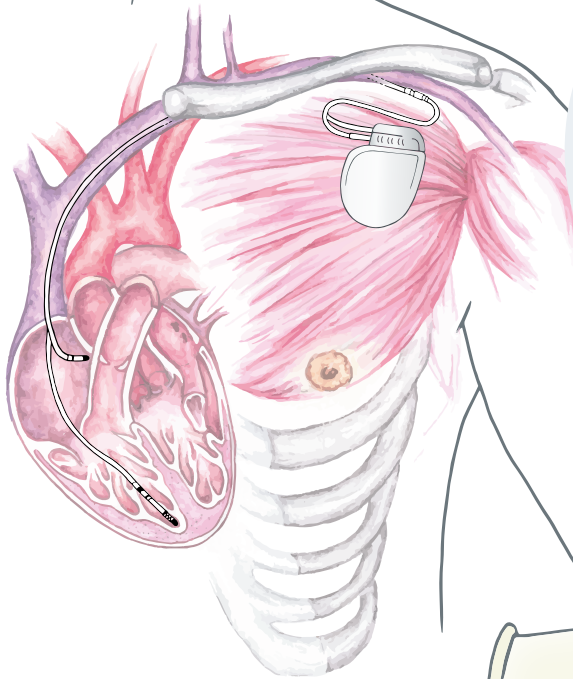

1

Après l'incision cutanée et l'accès à la poche, rincez le site chirurgical avec l'ancien générateur en place.

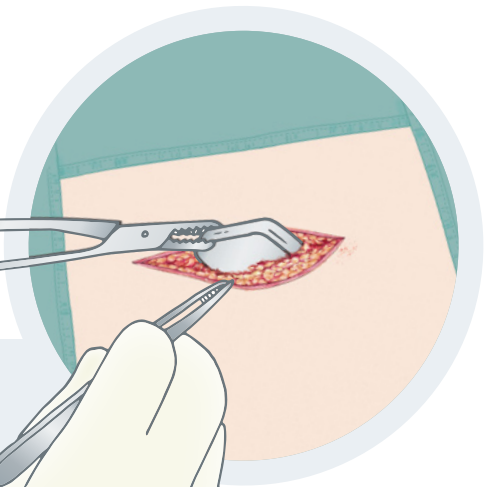
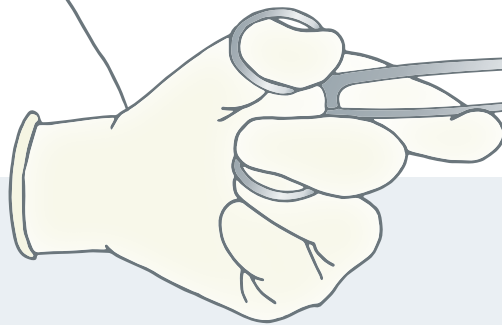


2



Mobilisez le vieux générateur.

3

Immerger le tournevis dans la solution **TauroPace™**.

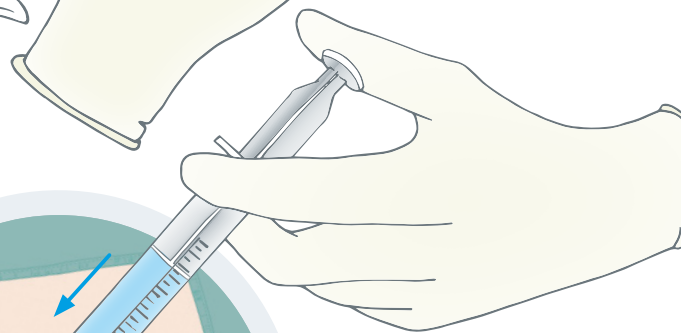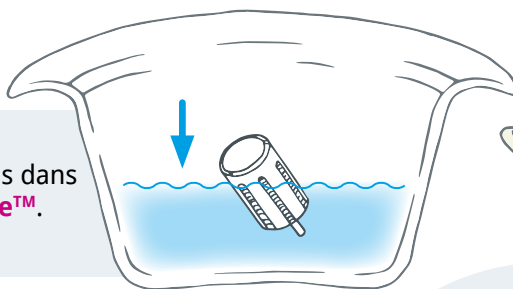


4

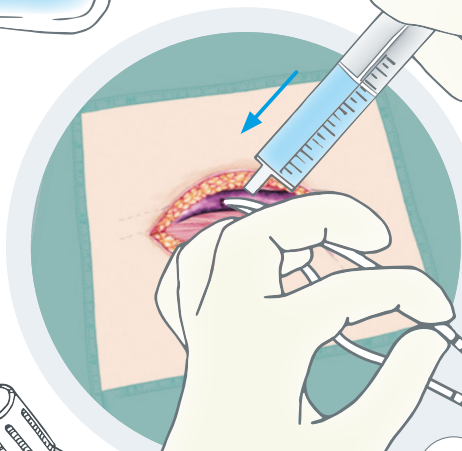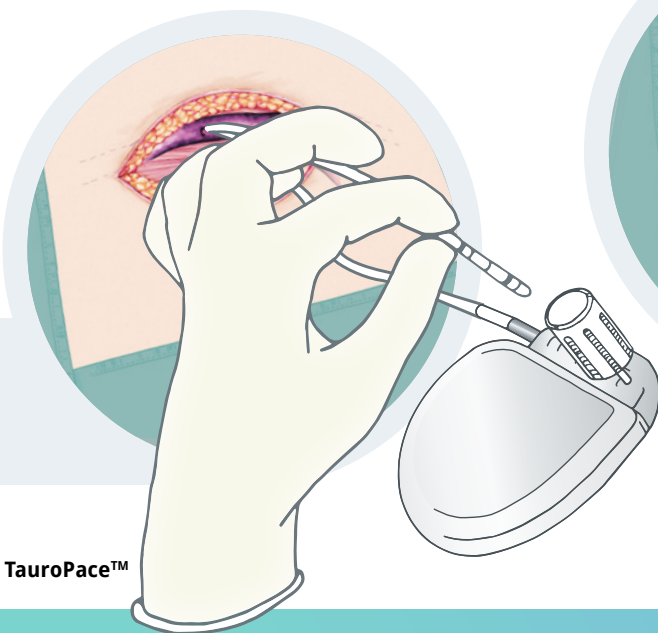


5

Déconnectez l'ancien générateur, essayez les électrodes en place avec une compresse imbibé de **TauroPace™** et rincez le site chirurgical avec **TauroPace™**.

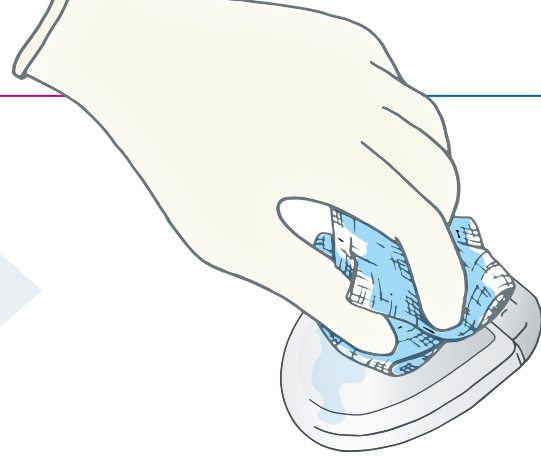

6

Essuyer le nouveau boîtier/générateur avec une compresse imbibée de **TauroPace™**.

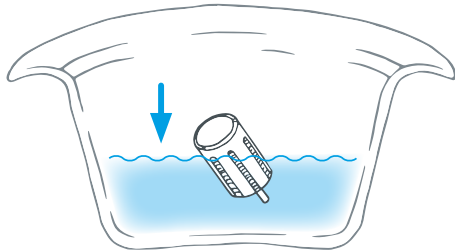


7

Immerger le tournevis dans la solution **TauroPace™**.

8

Connecter l'électrode (les électrodes) et le générateur; utiliser des compresses imbibées de **TauroPace™** pour maintenir l'électrode et le stimulateur.

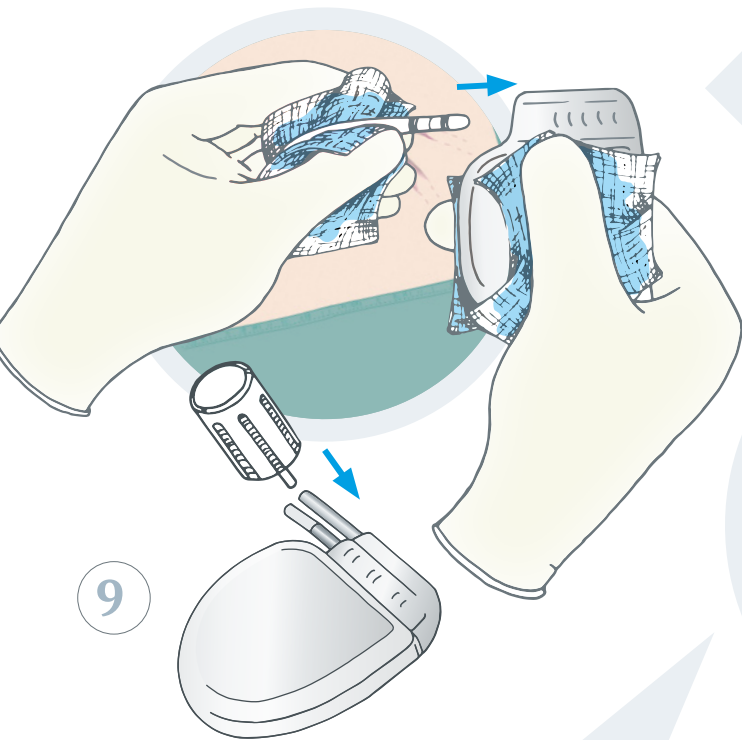

9

10 ml

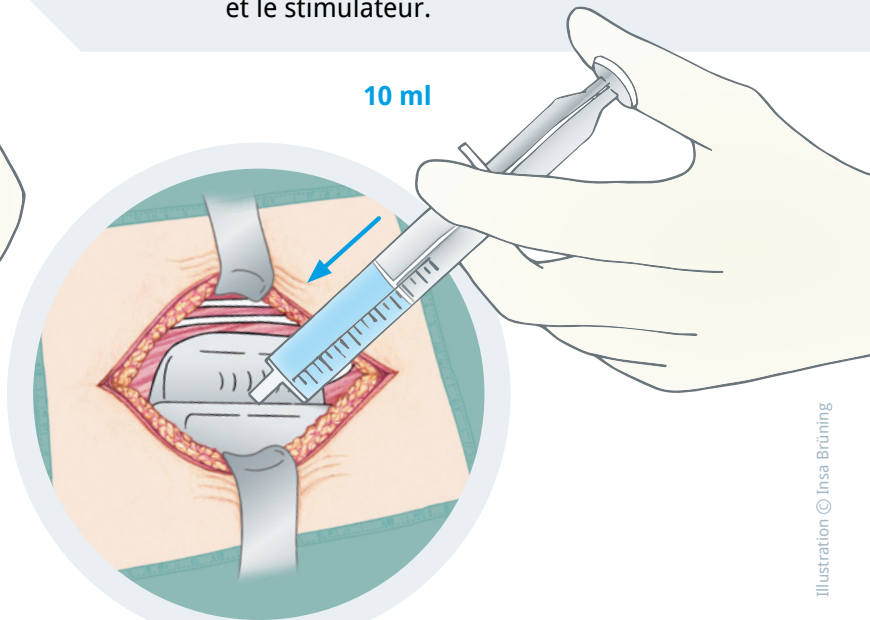


Illustration © Insa Brüning


10

Après la mise en place définitive de tout le matériel, rincer le site chirurgical avec **TauroPace™**.

11

Enlever l'excès de la solution **TauroPace™**.

APRÈS LA FERMETURE DE LA PEAU:

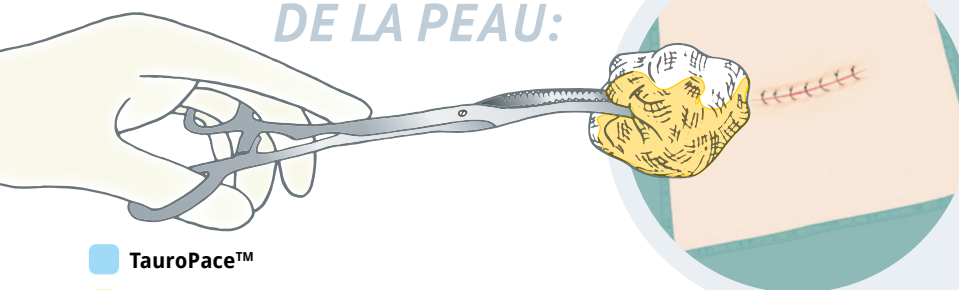

1

Après la fermeture de la peau, essuyer-la avec un antiseptique cutané recommandé.

2

Appliquer un pansement stérile sur la plaie.

Utilisez un flacon de **TauroPace™** par procédure.

TauroPace™

Solution antiseptique