
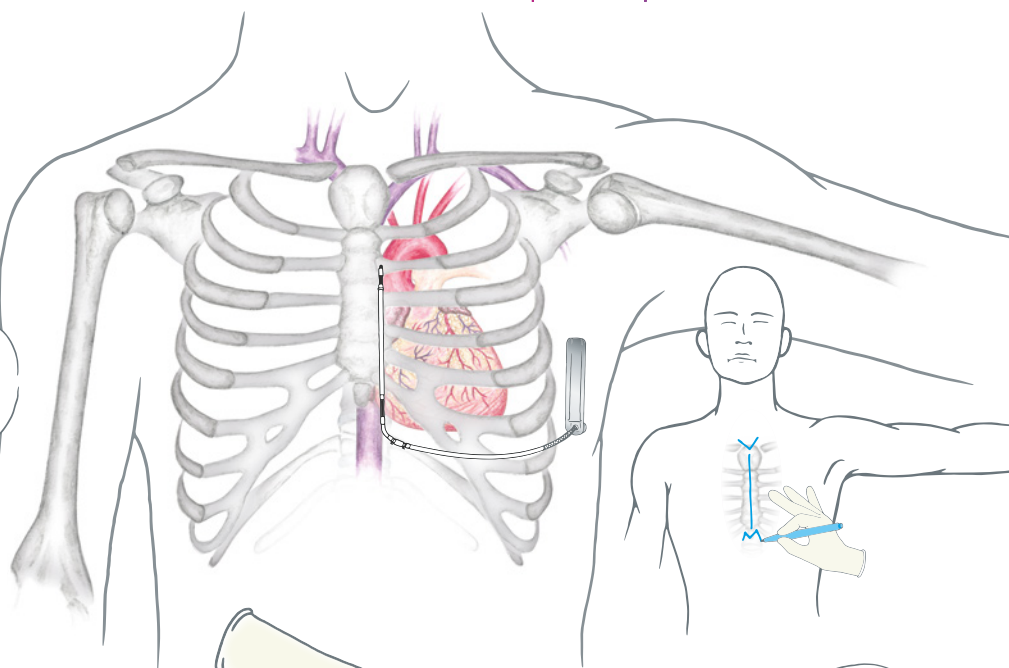


TauroPace™

Implantation d'un défibrillateur sous cutané

INSTRUCTIONS
ÉTAPE PAR ÉTAPE

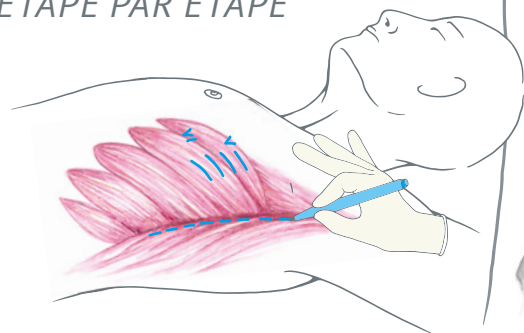

PRÉPARATION:

1

La préparation chirurgicale cutanée doit être effectuée le plus proche possible du début de l'intervention avec une solution antiseptique recommandée (envisager un bloc du plan du fascia pour l'anesthésie locale).


2

Drapage du patient.



3

Verser un flacon de **TauroPace™** dans une cupule contenant des compresses chirurgicales.

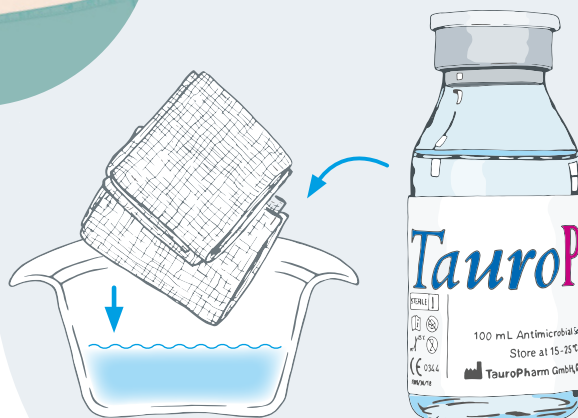


 **TauroPace™**

 Solution antiseptique




1

Inciser la peau au niveau de l'extrémité caudale de la xyphoïde. Humidifier le matériel de suture avec **TauroPace™** et appliquer le.

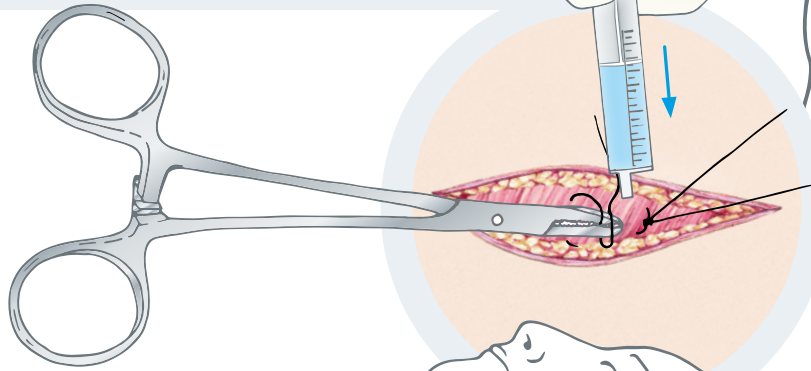


2





Préparer la loge du boîtier dans une position appropriée. Humidifier le matériel de suture avec **TauroPace™** et appliquer le.

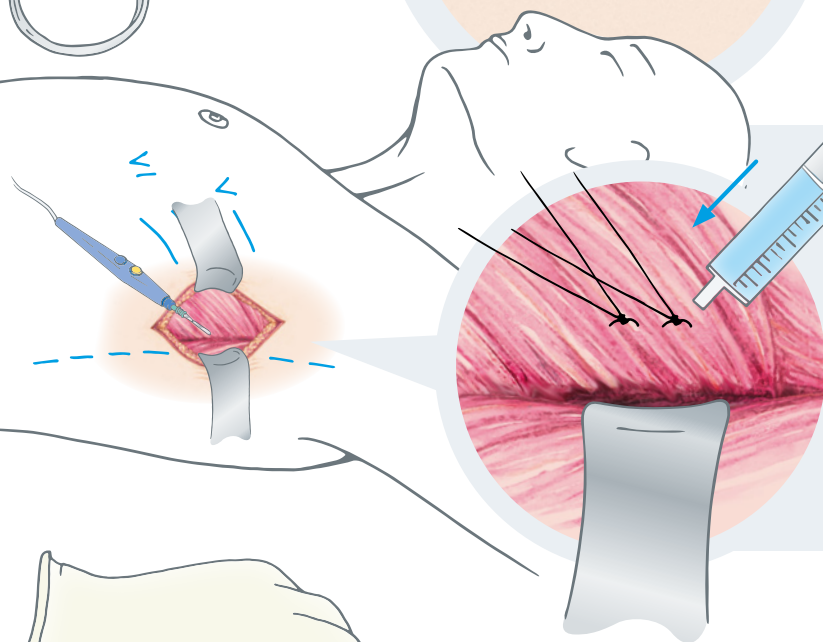

3

Tunneliser à l'aide du trocart désinfecté de l'incision de la zone sous-xyphoïdienne vers la loge du boîtier, connecter la sonde à l'extrémité caudale du trocart et tirer l'électrode vers la zone sous-xyphoïdienne. Tout en rétractant l'électrode, l'essuyer simultanément avec une compresse imbibée de **TauroPace™**.

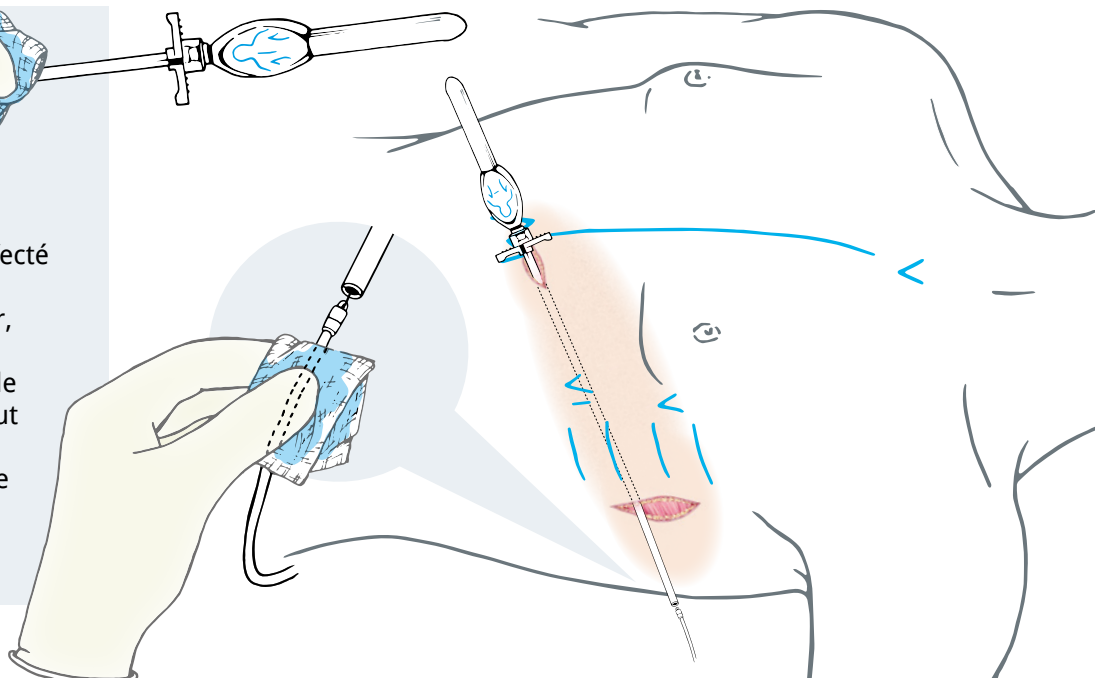

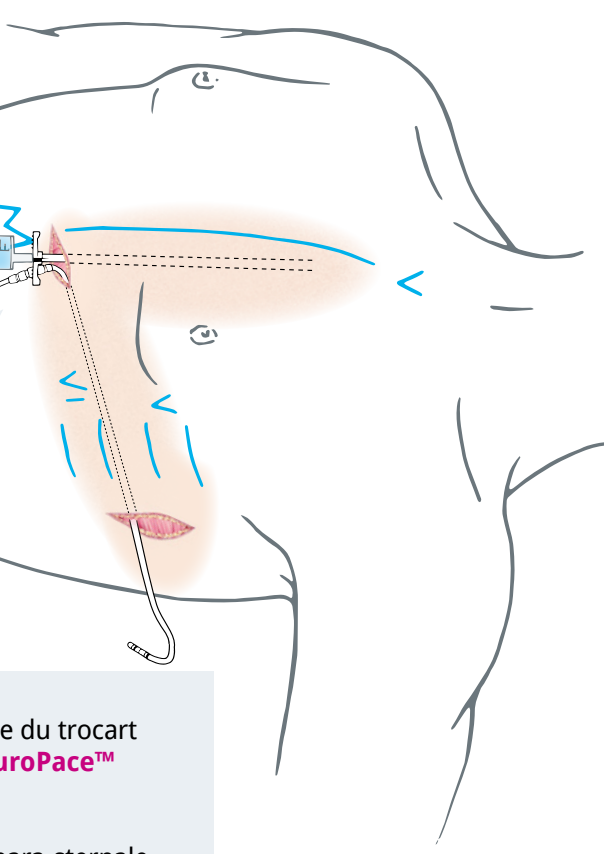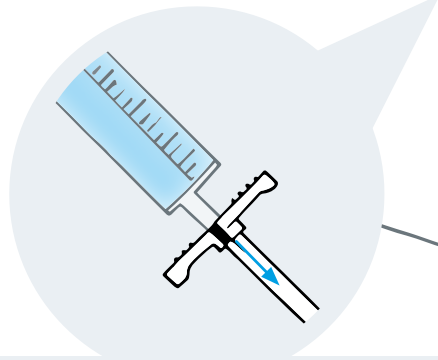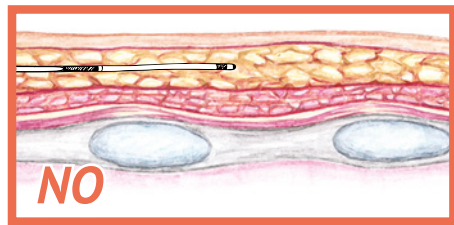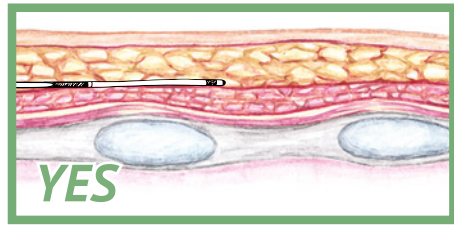


4

Après avoir insérer le tunnelisateur en position para-sternale à l'aide du trocart désinfecté, remplir l'introducteur en position sous-cutanée avec **TauroPace™** jusqu'à ce que l'excès de **TauroPace™** s'écoule de l'introducteur

Insérer la partie distale de l'électrode contenant le coil en position para-sternale. Cela répartit l'excédent de la solution **TauroPace™** et expulse l'air sous-cutané.


5

Fixer l'électrode dans cette position au niveau de l'olive de fixation dans la zone de l'incision (sous-xyphoïdienne) et humidifier les composants avec **TauroPace™**. Retirer l'introducteur.

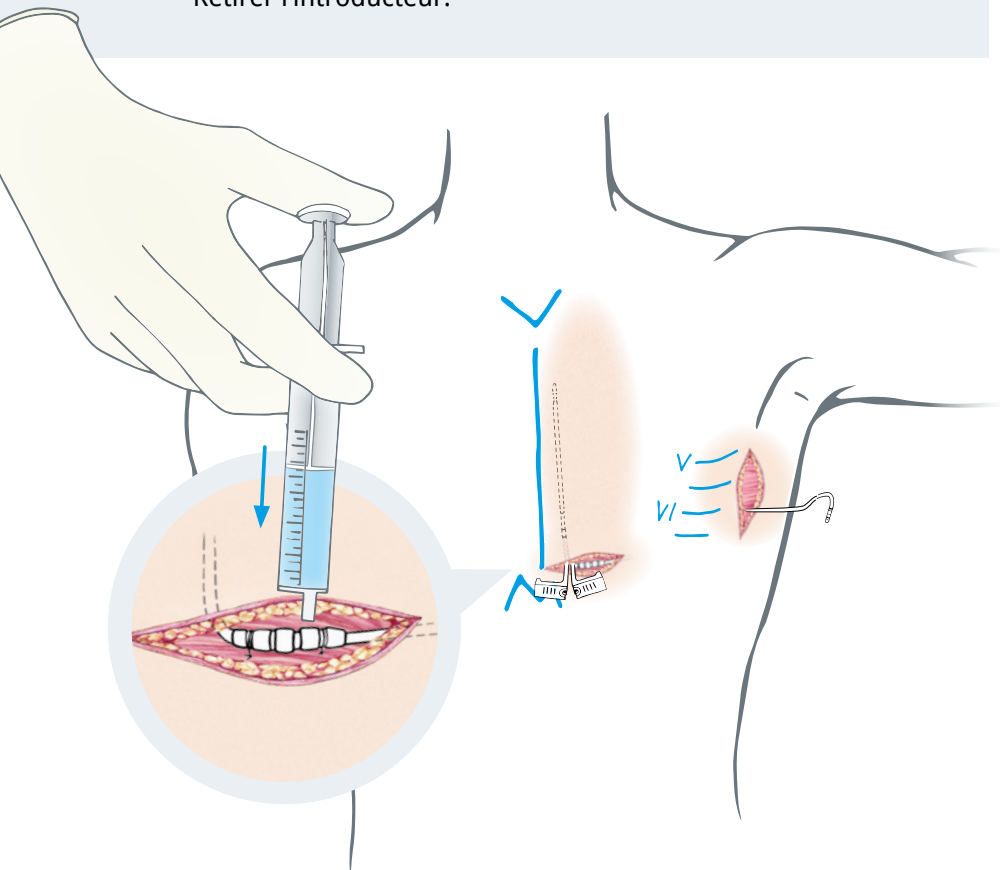


6

Humidifier le nouveau boîtier avec une compresse imbibée de **TauroPace™**.

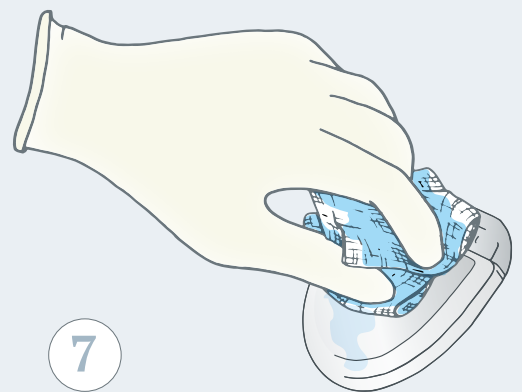

7

Immerger le tournevis dans la solution **TauroPace™**.

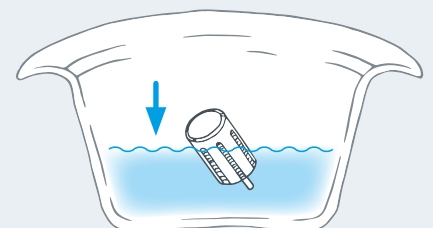



8

Connecter l'électrode au boîtier; utiliser des compresses imbibées de **TauroPace™** pour maintenir l'électrode et le générateur.

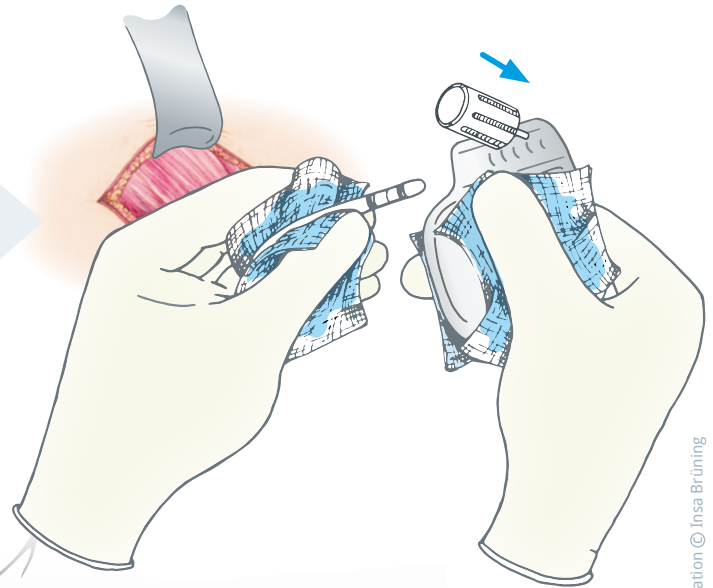
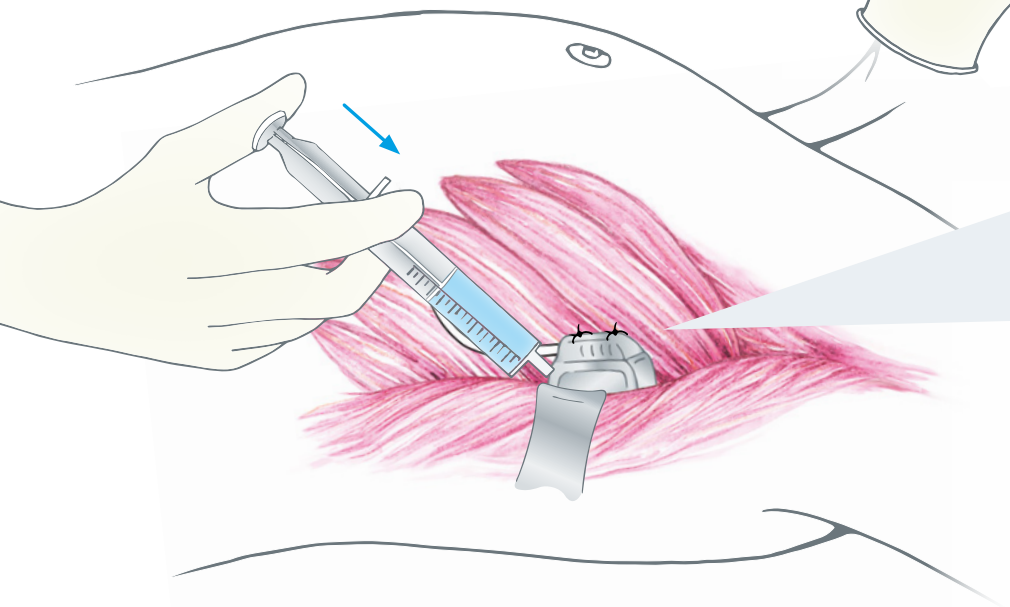


Illustration © Insa Brüning

9

Prendre la solution restante de **TauroPace™** et l'injecter dans la loge, le générateur fixé par suture se positionnera de manière optimale.


10

Enlever l'excès de **TauroPace™**.

 **TauroPace™**

 Solution antiseptique

APRÈS LA FERMETURE DE LA PEAU:

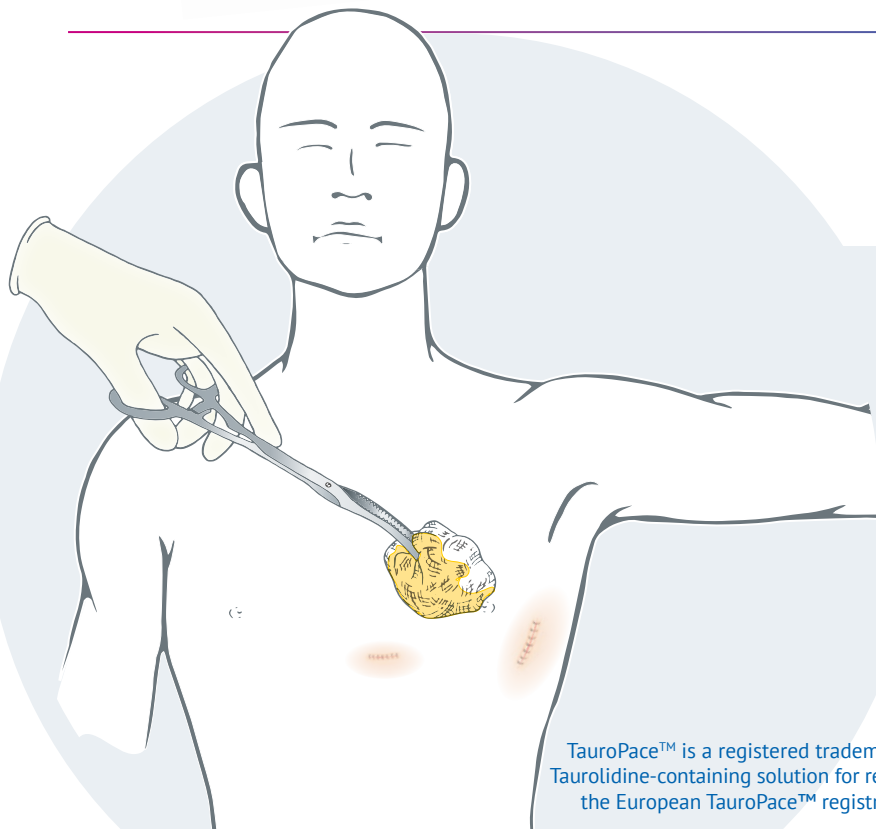

1

Après la fermeture de la peau, essuyer la zone suturée avec un antiseptique cutané recommandé.

2

Appliquer un pansement stérile sur la plaie.

Utilisez un flacon de **TauroPace™** par procédure.